

# AT103201H

Microdermoabrasione



Vi ringraziamo per la fiducia riposta nell'acquisto del prodotto. Ci auguriamo che questo manuale di istruzioni vi aiuti a trarre il massimo beneficio da questo prodotto.

Se avete dubbi sul suo utilizzo o sul suo funzionamento, siete pregati di contattare il vostro rivenditore.

## INTRODUZIONE

- Siete pregati di leggere attentamente il manuale di istruzioni nella sua interezza prima di procedere all'utilizzo del prodotto. Tenete conto delle avvertenze presenti in questo manuale.
- Conservate sempre questo manuale di istruzioni e, qualora il dispositivo venisse trasferito altrove, consegnate congiuntamente il manuale poiché rappresenta una parte essenziale del prodotto.
- Alcuni componenti del prodotto possono differire dall'immagine che compare nei cataloghi, nel sito web, nelle brochure commerciali, ecc.
- Al fine di apportare migliorie al prodotto, il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e/o la componentistica del medesimo senza preavviso.

## CORRETTO UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

- Questo prodotto è stato progettato per essere utilizzato da professionisti della bellezza nell'ambito di centri estetici e non deve essere utilizzato per altre finalità.
- Siete pregati di tener presente che qualsiasi improprio utilizzo del dispositivo comporta la perdita della garanzia.
- Non apportate alcuna modifica al dispositivo senza la previa autorizzazione del produttore.
- Il produttore e il rivenditore non saranno responsabili di alcun danno a persone o cose occasionato da un improprio utilizzo del prodotto.

## CONTROINDICAZIONI

- Questo prodotto non deve essere usato su:
  - Persone che recano nel corpo protesi metalliche
  - Persone portatrici di pacemaker o con problemi di natura cardiaca.
  - Donne in stato di gravidanza.
  - Persone con pelle sensibile, lesioni, infiammazioni o qualsiasi problema o patologia di natura dermatologica.
- In caso di persone sottoposte a trattamento medico o a percorso diagnostico è necessario utilizzare il prodotto sotto autorizzazione medica.

## MISURE PRECAUZIONALI

- Prima del primo utilizzo e dopo ciascun utilizzo, occorre verificare che il dispositivo e il cavo elettrico non siano danneggiati.
- Occorre scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di iniziare le operazioni di pulizia o qualsiasi tipo di manutenzione.
- Non utilizzate il prodotto all'aperto o in qualsiasi luogo in cui possa trovarsi soggetto a umidità o intemperie.
- Se il cavo di alimentazione dovesse presentare un qualsiasi tipo di difetto, scollegate immediatamente il dispositivo e informate immediatamente il rivenditore o un tecnico specializzato.
- Posizionate il cavo di alimentazione in modo corretto per evitare che si possa inciampare e collegatelo a una presa con messa a terra.
- Ogni giorno, a fine giornata, scollegate il dispositivo e scollegate il cavo di alimentazione dalla rete elettrica.
- Se doveste rilevare delle anomalie nel funzionamento del prodotto, consultate il vostro rivenditore o un tecnico specializzato.

## AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Il dispositivo e gli accessori devono essere tenuti lontano dalla portata dei bambini.
- Collegate il dispositivo solo a una presa di corrente correttamente installata. La tensione di rete locale deve corrispondere ai dati tecnici del dispositivo.
- La presa di corrente deve essere accessibile nel caso in cui sia necessario scollegare rapidamente l'apparecchio in un dato momento.
- Scollegate sempre tirando la spina e non il cavo elettrico.
- Non maneggiate mai nessun componente elettrico e non aprite né cercate di riparare alcun componente dell'apparecchio.
- Il dispositivo deve essere riparato unicamente dal vostro rivenditore o da un tecnico specializzato.
- Non avviate il dispositivo se quest'ultimo o il cavo di alimentazione presentano danni visibili.
- Non toccate mai il dispositivo o il cavo di alimentazione con le mani bagnate.



## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità principale x 1 unità
- Cavo di alimentazione x 1 unità
- Manipoli x 3 unità
- Testine con punta diamantata x 9 unità
- Tubo flessibile di aspirazione x 1 unità
- Filtri di spugna
- Manuale di istruzioni x 1 unità

## CARATTERISTICHE TECNICHE


Prodotto	Microdermoabrasione
Articolo	H3201
Tensione elettrica	85-265 V
Frequenza d'ingresso	50/60 Hz
Potenza	30 W
Dimensioni	28 x 17 x 11 cm
Peso netto	1,80 Kg

## IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

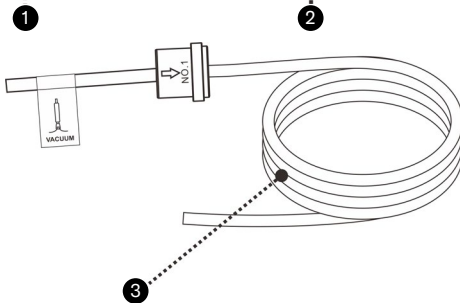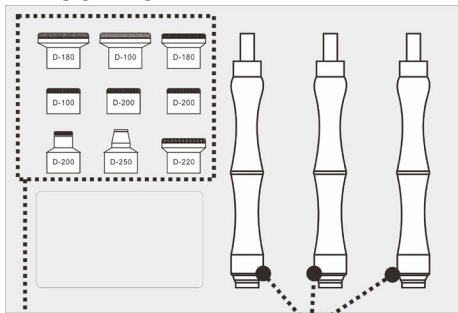


- 1 Testine con punta diamantata
- 2 Manipoli
- 3 Tubo flessibile di aspirazione

## PANNELLO DI CONTROLLO

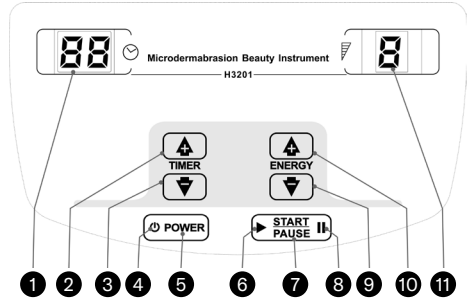

- 1 Timer
- 2 Pulsante per aumentare il tempo
- 3 Pulsante per diminuire il tempo
- 4 Spia accesa
- 5 Pulsante di accensione/spegnimento
- 6 Spia di funzionamento
- 7 Pulsante Start/Stop
- 8 Spia indicante la pausa
- 9 Pulsante per diminuire la potenza
- 10 Pulsante per aumentare la potenza
- 11 Display di potenza

## PANNELLO POSTERIORE

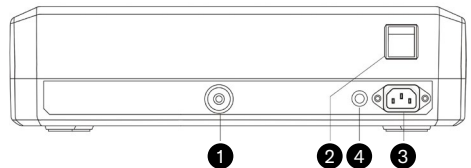


- 1 Collegamento del tubo flessibile di aspirazione
- 2 Interruttore dell'alimentazione
- 3 Connettore dell'alimentazione
- 4 Fusibile


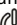






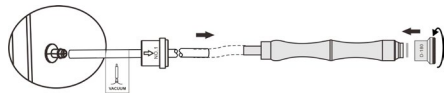


## ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO E IL MONTAGGIO

- Innanzitutto, dovete rimuovere 2 viti che si trovano nella parte inferiore del corpo principale. Un adesivo applicato sul dispositivo indica la necessità di rimuoverle e indica le 2 viti in questione.
- Collegate il cavo di alimentazione al pannello posteriore del corpo principale.
- Scegli una delle testine con punta di diamante e la colleghi al manipolo utilizzando la vite filettata. Prima di tutto inserisca il filtro in cotone all'interno della testina.




- Collegli il tubo flessibile di aspirazione alla corrispondente uscita posta sul pannello posteriore e all'estremità del manipo, come indicato in figura. Si tenga in considerazione la direzione della freccia sul filtro intermedio. La freccia deve puntare verso il manipo.



## ACCENSIONE E CONFIGURAZIONE

- Attivate l'interruttore di alimentazione che si trova sulla parte posteriore della macchina e premete **POWER**  sul pannello di controllo. La spia di alimentazione  si accenderà. La macchina si troverà in modalità standby e sarà pronta per il funzionamento. Sul pannello di controllo:
  - Il timer visualizzerà 15 minuti.
  - La spia di potenza visualizzerà 5.
  - Sul pulsante **START PAUSE** , si accenderà la spia indicante la pausa .
- Impostate il timer utilizzando i pulsanti  o  per impostare il tempo di funzionamento del dispositivo, in un intervallo compreso tra 1 e 30 min.
- Regolate la potenza utilizzando i pulsanti  o  per impostare la potenza della macchina, in un intervallo di potenza compreso tra 1 e 9.
- Utilizzate il pulsante **START PAUSE**  per avviare o stoppare il funzionamento del dispositivo.
  - Quando è in funzione, la spia  si accenderà.
  - Quando è in pausa o in attesa, la spia  si accenderà.

## FUNZIONAMENTO

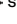- Collegate il dispositivo e lasciatelo in modalità standby con la spia .
- Imposti la potenza al minimo e selezioni il tempo di funzionamento.
- Fissi manualmente il manipo e prema **START PAUSE** . La spia di funzionamento  si accenderà e il dispositivo si avvierà.
- Avvicini il dispositivo alla pelle dell'area da trattare per iniziare il trattamento e regoli la potenza di aspirazione in base alle sue esigenze.


### Si prega di tener presente quanto segue:

- Pulisca la pelle prima di iniziare il trattamento.
- Si assicuri di aver precedentemente collocato il filtro di cotone all'interno della testina selezionata.
- Per scambiare le testine o un manipo con un altro, metta il dispositivo in modalità standby.
- La potenza di aspirazione deve essere tenuta sotto


controllo poiché un'elevata potenza potrebbe causare lesioni cutanee.

- Provate prima sulla vostra mano e poi fatelo con il paziente una volta regolata la potenza di aspirazione.
- Sostituisca periodicamente il filtro di cotone con uno nuovo.
- Più grande è il numero che compare sulla testina con punta diamantata, più fine sarà la grana. Lo tenga presente a seconda del trattamento da eseguire.
- Oltre alla grana, ci sono testine di diverse dimensioni. Scegli la misura adeguata a seconda della zona da trattare.

- Corpo, in particolare per ginocchia, gomiti e smagliature.

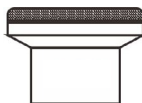

- Viso e grandi macchie

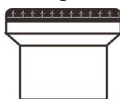

- Cicatrici, piccole rughe e imperfezioni



- Occhi, naso, rughe, punti neri e acne.



## PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di procedere alla pulizia del dispositivo, scollegatelo dalla rete elettrica.
- Pulite il dispositivo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzate liquidi per pulirlo.
- Dopo ciascun utilizzo, i diversi componenti e i diversi accessori devono essere sterilizzati e asciugati.
- Per la manutenzione o la riparazione di una qualsiasi parte del prodotto, è necessario che contattiate il vostro rivenditore o un tecnico specializzato.

## SMALTIMENTO

Se dovesse rendersi necessario smaltire il prodotto o una qualsiasi delle sue parti o dei suoi accessori, siete pregati di consultare e rispettare le leggi e i regolamenti applicabili alla gestione dei rifiuti e alla protezione ambientale.



→  
**REF. AT103201H**  
**MICRODERMOABRASIONE**



**CARATTERISTICHE  
TECNICHE**



Lunghezza: 28 cm

---

Larghezza: 17 cm

---

Altezza: 11 cm

---

Peso: 1,80 kg

---

Potenza: 30 W

---

Frequenza: 50/60 Hz

---

Tensione: 85-265 V

---

**INCLUDE**



- 3 manipolo di aspirazione
- 9 testine con punte di diamante
- Timer

**SPECIFICHE**



- 9 livelli de potenza

**CERTIFICAZIONI**



- 2014/30/EU EMC
- 2014/35/EU LVD
- 2011/65/EU Rohs