


AT105050H

Torre Multifunzione 9 in 1

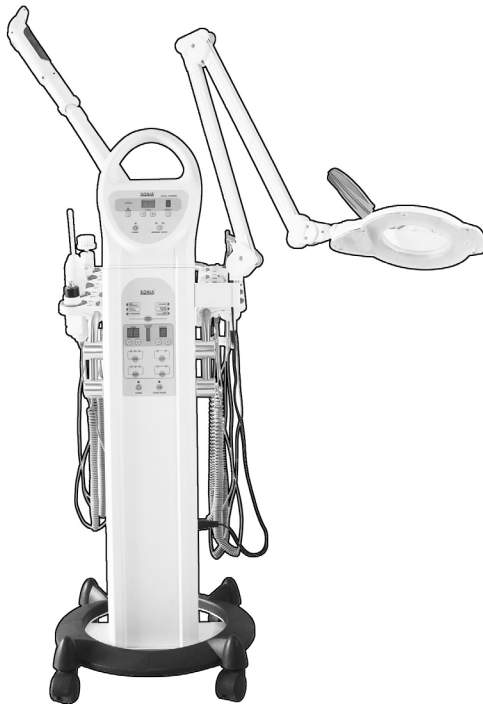

Grazie per la fiducia riposta nell'acquisto del prodotto. Ci auguriamo che questo manuale di istruzioni vi aiuti a trarre il massimo beneficio da questo prodotto.

Se avete dubbi sul suo utilizzo o sul suo funzionamento, siete pregati di contattare il vostro rivenditore.

INTRODUZIONE

- Siete pregati di leggere attentamente il manuale di istruzioni nella sua interezza prima di procedere all'utilizzo del prodotto. Tenete conto delle avvertenze presenti in questo manuale.
- Conservate sempre questo manuale di istruzioni e, qualora il dispositivo venisse trasferito altrove, consegnate congiuntamente il manuale poiché rappresenta una parte essenziale del prodotto.
- Alcuni componenti del prodotto possono differire dall'immagine che compare nei cataloghi, nel sito web, nelle brochure commerciali, ecc.
- Al fine di apportare migliorie al prodotto, il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e/o la componentistica del medesimo senza preavviso.

CORRETTO UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

- Questo prodotto è stato progettato per essere utilizzato da professionisti della bellezza nell'ambito di centri estetici e non deve essere utilizzato per altre finalità.
- Siete pregati di tener presente che qualsiasi improprio utilizzo del dispositivo comporta la perdita della garanzia.
- Non apportate alcuna modifica al dispositivo senza la previa autorizzazione del produttore
- Il produttore e il rivenditore non saranno responsabili di alcun danno a persone o cose occasionato da un improprio utilizzo del prodotto.

CONTROINDICAZIONI

- Questo prodotto non deve essere usato su:
 - Persone che recano nel corpo protesi metalliche
 - Persone portatrici di pacemaker o con problemi di natura cardiaca.
 - Donne in stato di gravidanza.
 - Persone con pelle sensibile, lesioni, infiammazioni o qualsiasi problema o patologia di natura dermatologica.
- In caso di persone sottoposte a trattamento medico o a percorso diagnostico è necessario utilizzare il prodotto sotto autorizzazione medica.

MISURE PRECAUZIONALI

- Prima del primo utilizzo e dopo ciascun utilizzo, occorre verificare che il dispositivo e il cavo elettrico non siano danneggiati.
- Occorre scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di iniziare le operazioni di pulizia o qualsiasi tipo di manutenzione.
- Non utilizzate il prodotto all'aperto o in qualsiasi luogo in cui possa trovarsi soggetto a umidità o intemperie.
- Se il cavo di alimentazione dovesse presentare un qualsiasi tipo di difetto, scollegate immediatamente il dispositivo e informate immediatamente il rivenditore o un tecnico specializzato.
- Posizionate il cavo di alimentazione in modo corretto per evitare che si possa inciampare e collegatelo a una presa con messa a terra.
- Ogni giorno, a fine giornata, scollegate il dispositivo e scollegate il cavo di alimentazione dalla rete elettrica.
- Se dovete rilevare delle anomalie nel funzionamento del prodotto, consultate il vostro rivenditore o un tecnico specializzato.

AVVERTENZE DI SICUREZZA


- Il dispositivo e gli accessori devono essere tenuti lontano dalla portata dei bambini.
- Collegate il dispositivo solo a una presa di corrente correttamente installata. La tensione di rete locale deve corrispondere ai dati tecnici del dispositivo.
- La presa di corrente deve essere accessibile nel caso in cui sia necessario scollegare rapidamente l'apparecchio in un dato momento.
- Scollegate sempre tirando la spina e non il cavo elettrico.
- Non maneggiate mai nessun componente elettrico e non aprite né cercate di riparare alcun componente dell'apparecchio.
- Il dispositivo deve essere riparato unicamente dal vostro rivenditore o da un tecnico specializzato.
- Non avviate il dispositivo se quest'ultimo o il cavo di alimentazione presentano danni visibili.
- Non toccate mai il dispositivo o il cavo di alimentazione con le mani bagnate.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Torre principale x 1 unità
- Base con ruote x 1 unità
- Vapozone visage x 1 unità
- Lampada ingrandimento x 1 unità
- Cavo di alimentazione x 1 unità
- Sonda facciale x 1 unità
- Sonda oculare x 1 unità

- Spatola x 1 unità
- Braccialetto di contatto x 1 unità
- Manipolo ad alta frequenza x 1 unità
- Elettrodo a forma di fungo x 1 unità
- Elettrodo a forma di cucchiaino x 1 unità
- Elettrodo a forma di palla x 1 unità
- Elettrodo cilindrico x 1 unità
- Manipolo sonde galvaniche e barra metallica x 1 unità
- Sonda galvanica a rullo, a sfera e pulsante x 1 unità
- Tubo flessibile del serbatoio spray x 1 unità
- Tubo flessibile del serbatoio di aspirazione x 1 unità
- Cotone per oli essenziali x 2 unità
- Serbatoio spray x 2 unità
- Testine aspiranti x 3 unità
- Manipolo di aspirazione x 1 unità
- Filtro spugna x 2 unità
- Manipolo spazzola x 1 unità
- Spazzola piccola in pietra pomice x 1 unità
- Spazzola piccola x 1 unità
- Spazzola grande in pietra pomice x 1 unità
- Spazzola grande in gomma EVA x 1 unità
- Spazzola grande 1 x 1 unità
- Spazzola grande 2 x 1 unità
- Manuale di istruzioni x 1 unità

IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

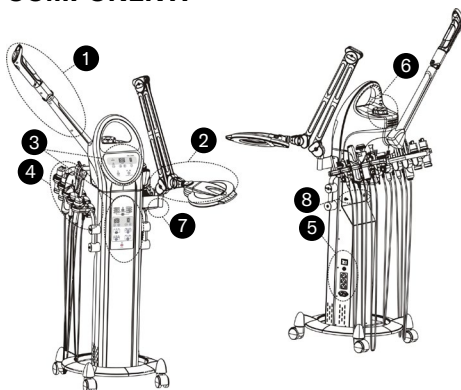


- 1 Braccio del vaporizzatore
- 2 Lampada con lente di ingrandimento
- 3 Pannello di controllo
- 4 Supporto per manipoli
- 5 Collegamenti elettrici
- 6 Vaporizzatore con tappo di riempimento
- 7 Supporto per lampada con lente di ingrandimento
- 8 Connessioni della funzione di vaporizzazione e di aspirazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotto	Torre Multifunzione 9 in 1
Articolo	H5050
Tensione elettrica	AC 220-240 V~
Frequenza d'ingresso	50/60 Hz
Potenza	900 W
Dimensioni	120 x 44 x 55 cm
Peso netto	27,70 Kg


- Vaporizzatore digitale viso H1106
- Lampada ingrandimento LED H6001T
- Ultrasuoni
- Peeling ultrasonico
- Alta frequenza
- Spazzola rotante
- Corrente galvanica
- Spruzzo
- Aspirazione

Include

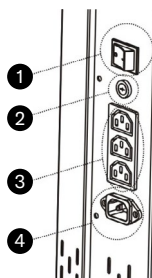

- 1 Interruttore principale
- 2 Fusibile
- 3 Prese di corrente per accessori
- 4 Presa di corrente della torre


- Ultrasuoni

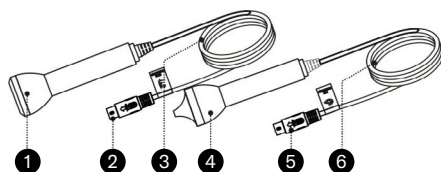

- 1 Sonda facciale
- 2 Connettore del cavo della sonda facciale
- 3 Cavo flessibile della sonda facciale


- 4 Sonda oculare
- 5 Connettore del cavo della sonda oculare
- 6 Cavo flessibile della sonda oculare

• Peeling ultrasonico

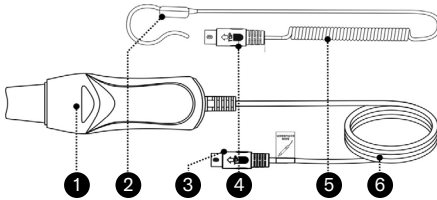

- 1 Spatola
- 2 Bracciale di contatto
- 3 Connettore del cavo della spatola
- 4 Connettore del cavo del bracciale di contatto
- 5 Cavo flessibile del bracciale di contatto
- 6 Cavo flessibile della spatola

• Alta frequenza

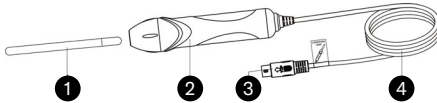

- 1 Elettrodi
- 2 Manipolo alta frequenza
- 3 Connettore del cavo ad alta frequenza
- 4 Cavo flessibile ad alta frequenza

- Elettrodo a forma di fungo




- Elettrodo a forma di cucchiaio




- Elettrodo a forma di palla



- Elettrodo a forma cilindrica

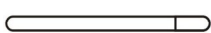


• Corrente galvanica

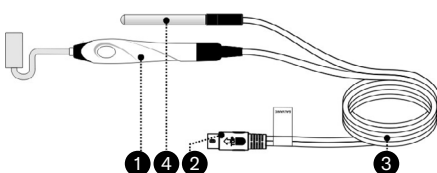


- 1 Manipolo con sonda a rullo
- 2 Connettore del cavo del manipolo della sonda a rullo
- 3 Cavo flessibile della sonda a rullo
- 4 Barra metallica

• Spray & Vacuum

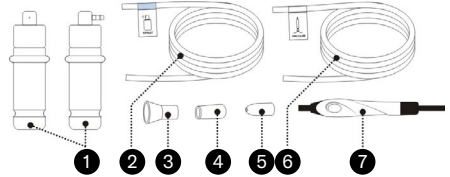


- 1 Serbatoio spray
- 2 Tubo flessibile del serbatoio spray
- 3 Testina grande
- 4 Testina media
- 5 Testina piccola
- 6 Tubo di aspirazione flessibile
- 7 Manipolo di aspirazione

Serbatoio spray

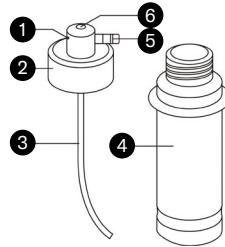

- 1 Uscita spray
- 2 Coperchio del serbatoio
- 3 Tubo di aspirazione
- 4 Serbatoio spray
- 5 Tubo di collegamento del serbatoio spray
- 6 Uscita dell'aria


Manipolo di aspirazione

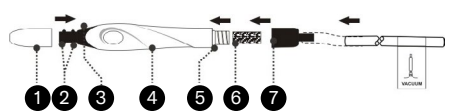

- 1 Testina
- 2 Guarnizioni di tenuta della testina
- 3 Uscita dell'aria
- 4 Manipolo di aspirazione


- 5 Guarnizioni e viti filettate
- 6 Filtro a spugna
- 7 Estremità del manipolo

- Spazzola rotante
- Manipolo della spazzola

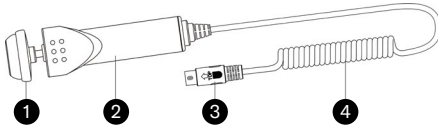

- 1 Testina
- 2 Manipolo
- 3 Collegamento del cavo della spazzola
- 4 Cavo flessibile della spazzola


Spazzole

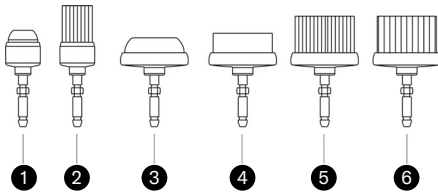


- 1 Spazzola piccola in pietra pomice
- 2 Spazzola piccola
- 3 Spazzola grande in pietra pomice
- 4 Spazzola in gomma EVA
- 5 Spazzola grande 1
- 6 Spazzola grande 2

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO E IL MONTAGGIO


- Unire la torre principale alla base dotata di ruote utilizzando le 4 viti.
- Inserisca la lampada con lente di ingrandimento nel proprio supporto. Collegli il cavo di alimentazione della lampada a una delle prese di corrente per gli accessori sulla parte laterale della torre.
- Installi il vaporizzatore facciale nella torre principale.
- Sblocchi il braccio del vaporizzatore: quando estrae il vaporizzatore dalla scatola, il braccio sarà bloccato. Seguendo le frecce nell'immagine tiri verso l'esterno il perno per sbloccare il braccio e lo ruoti verso l'alto per completarne lo sblocco. Il braccio rimarrà libero consentendo un angolo di rotazione di 150°.
- Sblocchi il supporto dei manipoli: ruoti il supporto dei manipoli verso l'alto fino a raggiungere la posizione finale, come indicato nelle figure a seguire. Quindi lo avviti.

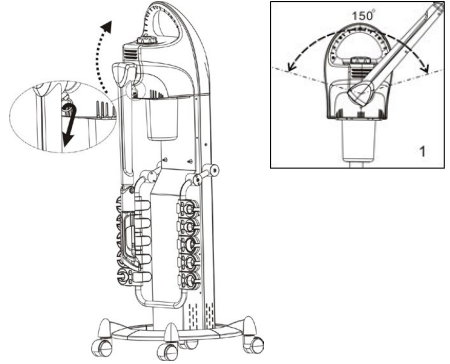

- Montaggio e lo smontaggio dell'elettrodo ad alta frequenza

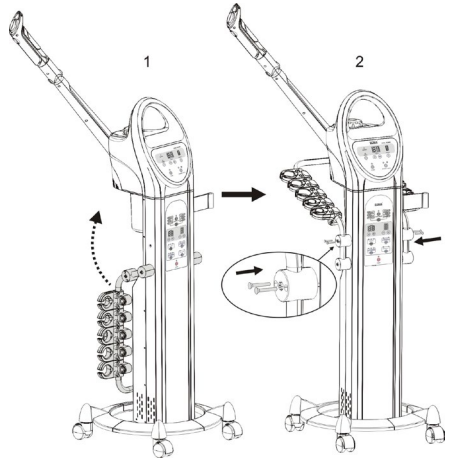

- Montaggio e lo smontaggio dell'elettrodo ad alta frequenza

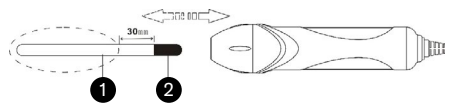


- 1 Parte in vetro dell'elettrodo
- 2 Parte metallica dell'elettrodo

- Durante il montaggio e lo smontaggio dell'elettrodo ad alta frequenza, manipoli con


le mani nell'area contrassegnata da una linea tratteggiata, mantenendo una distanza di 30 mm dalla parte metallica dell'elettrodo

- Posizioni i manopoli e gli accessori sul supporto dei manopoli così come indicato in figura

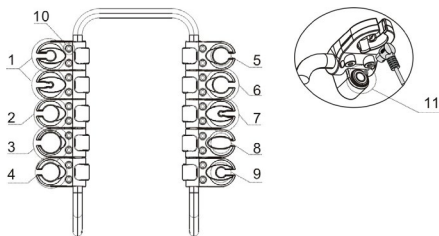


- 1 Manopolo sonde galvaniche e barra metallica
- 2 Manopolo spazzola
- 3 Manopolo ad alta frequenza
- 4 Serbatoio spray
- 5 Sonda facciale
- 6 Sonda oculare
- 7 Bracciale di contatto
- 8 Spatola
- 9 Manopolo di aspirazione
- 10 Tubo dell'elettrodo
- 11 Connessione di accessori


- Colleghi un'estremità del tubo flessibile dell'aria con l'etichetta "spray tube" all'attacco del serbatoio di nebulizzazione, e l'altra estremità al raccordo di nebulizzazione della torre "SPRAY".

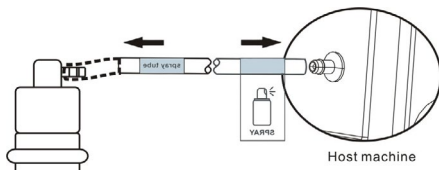

- Colleghi un'estremità del tubo flessibile dell'aria con l'etichetta "vacuum tube" al raccordo di aspirazione della torre "VACUUM" e l'altra estremità all'attacco del manopolo di aspirazione. Controllate l'estremità della manica di aspirazione per vedere se il filtro spugna è installato; se così non fosse, installatelo. Si tenga in considerazione la direzione della freccia sul filtro intermedio. La freccia deve puntare verso il manopolo.

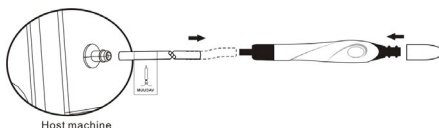


- Riempia il serbatoio dell'acqua, aprendo il tappo del serbatoio del vaporizzatore e introducendo acqua distillata. Il livello dell'acqua deve trovarsi tra le linee "MIN" e "MAX".

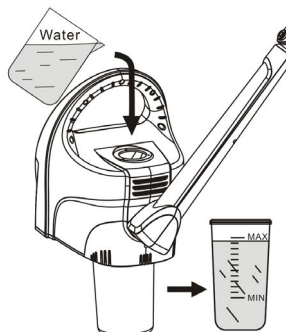

FUNZIONE VAPORIZZATORE VISO



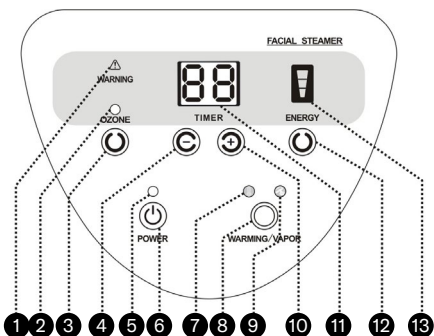


- Misure precauzionali
 - Si consiglia l'uso di acqua distillata per prolungare la vita utile dei componenti del vaporizzatore.
 - Prima di utilizzare il vaporizzatore facciale, verifichi che il serbatoio dell'acqua sia stato correttamente avvitato e serrato e che il livello dell'acqua sia compreso tra i segni di livello "MAX" e "MIN".
 - Verifichi la distanza di sicurezza tra la bocchetta e il viso del paziente. Potrebbe causare ustioni alla pelle.
 - Per aggiungere olio essenziale, il vaporizzatore deve essere in modalità standby.
 - Attenda fino a quando il vapore esca in modo costante prima di iniziare il trattamento.
 - La funzione ozono deve essere utilizzata a discrezione del professionista in funzione della tipologia di pelle da trattare.
 - Regoli il braccio del vaporizzatore in base agli angoli che appaiono più avanti in questo manuale. Non forzi alcun movimento.
 - Per rimuovere il serbatoio dell'acqua, attenda che si sia raffreddato prima di svinarlo con le mani.
 - Qualora notasse una perdita d'acqua, scollegi la torre dall'alimentazione elettrica. Successivamente verifichi che il deposito dell'acqua sia correttamente avvitato. Se il problema persiste, contatti il suo rivenditore.

• Pannello di controllo








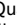



- 1 Spia di avvertimento del livello dell'acqua
- 2 Indicatore della funzione ozono
- 3 Pulsante on/off della funzione ozono
- 4 Pulsante per diminuire il tempo
- 5 Spia accesa
- 6 Pulsante di accensione/spegnimento
- 7 Spia di riscaldamento
- 8 Pulsante Riscaldamento/Vaporizzazione
- 9 Spia di vaporizzazione
- 10 Pulsante per aumentare il tempo
- 11 Timer
- 12 Pulsante per la regolazione del volume del vapore
- 13 Spia del volume del vapore

• Accensione e configurazione

- Collegli il cavo di alimentazione alla presa di corrente presente nella torre e accenda l'interruttore principale.
- Il livello dell'acqua all'interno del serbatoio deve essere compreso tra i livelli "MIN" e "MAX".
- Prema  sul pannello di controllo e la spia dell'alimentazione si illuminerà di blu. La macchina sarà in modalità standby e nel pannello di controllo:
 - Il timer visualizzerà 15 minuti.
 - La spia del volume del vapore mostrerà il livello massimo.
 - La spia della funzione ozono sarà spenta.
 - Le spie di riscaldamento  e vaporizzazione  saranno spente.
- Prema il pulsante  per passare dalla modalità stand-by alle funzioni di riscaldamento e vaporizzazione.
 - Se la spia  si illumina di rosso, la funzione riscaldamento sarà attiva. Il timer mostrerà di default 30 minuti e inizierà il conto alla rovescia.
 - Una volta raggiunta la temperatura di


riscaldamento, quest'ultima verrà mantenuta fino a quando il timer non arriverà a 0.

- Se la spia  si illuminerà di verde, la funzione vaporizzazione sarà attiva. Il timer mostrerà di default 15 minuti e inizierà il conto alla rovescia.
 - Dopo pochi minuti inizierà a uscire vapore dalla bocchetta che si trova sulla testina del braccio.
- Imposti il timer utilizzando i pulsanti  o  per stabilire il tempo di funzionamento delle diverse funzioni.
 - Per la funzione riscaldamento  c'è un intervallo tra 1 e 90 min.
 - Per la funzione vaporizzazione  c'è un intervallo tra 1 e 30 min.
 - Questa funzione consente di definire il tempo di funzionamento per le 2 funzioni: riscaldamento e vaporizzazione
- Regola il volume di vapore che uscirà dalla bocchetta utilizzando il pulsante "ENERGY".
 - Quando l'indicatore  si illumina completamente, il volume del vapore raggiungerà il massimo livello.
 - Quando l'indicatore  si illumina a metà, il volume del vapore raggiungerà il livello medio.
 - Quando l'indicatore  ha 1 sola tacca illuminata, volume del vapore sarà al livello minimo.
- Attivare la funzione Ozono premendo il pulsante "OZONE". L'indicatore della funzione ozono si illuminerà di verde. Prema di nuovo per disattivare la funzione e l'indicatore si spegnerà.
- Regoli il braccio del vaporizzatore con diversi angoli:
 - 150° verso sinistra e verso destra
 - 60° avanti e indietro
 - Testina regolabile a 360°

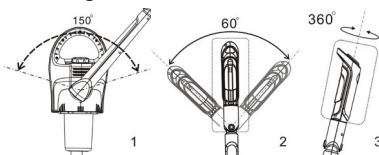




- Aggiunga gli oli essenziali aprendo il coperchio

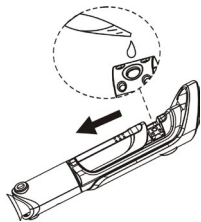scorrevole posto sulla parte superiore della bocchetta della testina del braccio e lasciando cadere una o due gocce di olio sul cotone.



Si prega di tener presente quanto segue


- La funzione riscaldamento è una funzione di conservazione del calore.
- Se prima di attivare la funzione vaporizzazione è stata attivata la funzione riscaldamento, il tempo necessario per la fuoriuscita del vapore sarà inferiore rispetto a quando attiviamo direttamente la funzione vaporizzazione.
- Se, durante l'utilizzo delle funzioni riscaldamento o vaporizzazione, sul timer compare "E2", la spia "WARNING" lampeggia e viene emesso un segnale acustico, questo sta a significare che il livello dell'acqua è troppo alto. La funzione attiva in quel momento si arresterà immediatamente.
 - Una volta che il livello dell'acqua si posizionerà tra i livelli "MAX" e "MIN" le funzioni si sbloccheranno. Prema  per riprendere le operazioni.
- Se, durante l'utilizzo delle funzioni riscaldamento o vaporizzazione, sul timer compare "E1", la spia "WARNING" lampeggia e viene emesso un segnale acustico, questo sta a significare che il livello dell'acqua è troppo basso. La funzione attiva in quel momento si arresterà immediatamente.
 - Effettui il riempimento utilizzando acqua distillata per sbloccare le funzioni e riprendere il funzionamento.
- Se ha necessità di sostituire l'olio essenziale, rimuova il cotone aprendo il coperchio scorrevole posto sulla parte superiore della bocchetta della testina del braccio, rimuova il cotone con una pinzetta e lo sostituisca con uno nuovo. Quindi aggiunga l'olio.
- Regoli il volume del suono dei segnali acustici del vaporizzatore: ad apparecchio spento, attivi l'interruttore principale posizionato sul lato, quindi preme e tenga premuto il pulsante "ENERGY" fino a che sul timer non venga visualizzato 5. Questo è il valore di default del volume del suono e che può regolare usando  o  in un intervallo da 0 a 9, partendo dal volume 0 per accrescere il volume fino a raggiungere il massimo a 9. A questo punto il volume selezionato lampeggerà e verrà salvato

automaticamente.

FUNZIONI: ULTRASUONI, PEELING ULTRASONICO, ALTA FREQUENZA, CORRENTE GALVANICA, SPRUZZO, ASPIRAZIONE E SPAZZOLA ROTANTE

- Prima di attivare qualsiasi funzione preme sul pannello di controllo la spia di accensione si illuminerà di blu. La torre entrerà in modalità standby e sarà possibile selezionare la funzione da utilizzare sul pannello di controllo.

• PANNELLO DI CONTROLLO

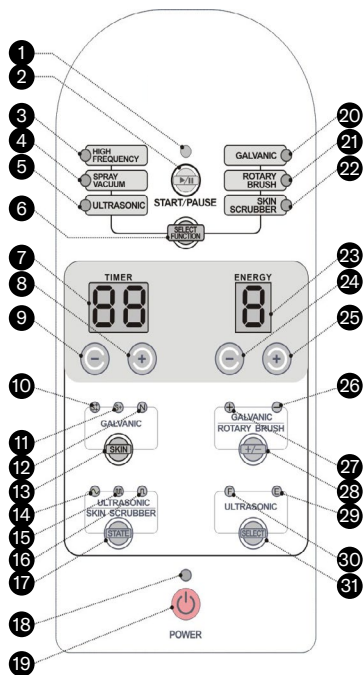





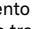

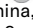

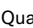
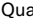


- 1 Spia di funzionamento
- 2 Pulsante Start/Stop
- 3 Spia di funzione ad alta frequenza
- 4 Spia della funzione di nebulizzazione e aspirazione
- 5 Spia della funzione ultrasuoni
- 6 Pulsante di selezione delle funzioni
- 7 Timer
- 8 Pulsante per aumentare il tempo
- 9 Pulsante per diminuire il tempo
- 10 Spia per pelli molto sensibili.
- 11 Spia della funzione galvanica
- 12 Pulsante della funzione galvanica
- 13 Spia della funzione spazzola rotante
- 14 Pulsante della funzione spazzola rotante
- 15 Spia della funzione ultrasuoni
- 16 Pulsante della funzione ultrasuoni
- 17 Pulsante di accensione
- 18 Spia di accensione
- 19 Pulsante di accensione
- 20 Spia della funzione galvanica
- 21 Pulsante della funzione galvanica
- 22 Spia della funzione spazzola rotante
- 23 Pulsante della funzione spazzola rotante
- 24 Spia della funzione ultrasuoni
- 25 Pulsante della funzione ultrasuoni
- 26 Spia della funzione ultrasuoni
- 27 Spia della funzione galvanica
- 28 Pulsante della funzione galvanica
- 29 Spia della funzione ultrasuoni
- 30 Pulsante della funzione ultrasuoni
- 31 Pulsante di accensione


- 11 Spia per pelli sensibili
- 12 Spia per pelli normali
- 13 Selezione della tipologia di pelle
- 14 Spia di lavoro in forma d'onda continua
- 15 Spia di lavoro in forma d'onda discontinua
- 16 Spia di lavoro sotto forma d'onda d'impulso
- 17 Selezione della forma d'onda
- 18 Spia accesa
- 19 Pulsante di accensione/spengimento
- 20 Spia della funzione a corrente galvanica
- 21 Spia della funzione a spazzola rotante
- 22 Spia della funzione esfoliante
- 23 Display di potenza
- 24 Pulsante per ridurre la potenza
- 25 Pulsante per aumentare la potenza
- 26 Spia della conduzione anionica (carica negativa) / Spia di rotazione in senso antiorario
- 27 Spia della conduzione cationica (carica positiva) / Spia di rotazione in senso orario
- 28 Pulsante di selezione della conduzione ionica / Selezione del senso di rotazione della spazzola
- 29 Spia di funzionamento della sonda oculare
- 30 Spia di funzionamento della sonda facciale
- 31 Selezione della sonda a ultrasuoni

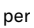● Funzione ultrasuoni


- Accensione e configurazione


- In modalità standby, prema  per selezionare la funzione a ultrasuoni. L'indicatore  si illuminerà di verde e sul pannello di controllo:
 - Il timer visualizzerà 15 minuti.
 - La spia di potenza visualizzerà 5.
 - La spia di funzionamento della sonda facciale  si accenderà.
 - La spia di lavoro in forma d'onda continua  si accenderà.
 - Sopra il pulsante , la spia di Start/Stop si illuminerà di rosso.
- Impostate il timer utilizzando i pulsanti  o  per impostare il tempo di funzionamento del dispositivo, in un intervallo compreso tra 1 e 30 min.
- Regolate la potenza utilizzando i pulsanti  o  per impostare la potenza della macchina, in un intervallo di potenza compreso tra 1 e 9.
- Selezione della sonda: utilizzate il pulsante  per selezionare la sonda a ultrasuoni da utilizzare.
 - Quando la spia  si accende, viene selezionata la sonda facciale.
 - Quando la spia  si accende, viene

selezionata la sonda oculare.

- Selezione del tipo di onda: utilizzate il pulsante  per selezionare il tipo di onda.

- Quando la spia  si accende, il tipo d'onda selezionata è quella continua.

- Quando la spia  si accende, il tipo d'onda selezionata è quella discontinua.

- Quando la spia  si accende, il tipo d'onda selezionata è quella a impulso.

- Utilizzate il pulsante  per avviare o stoppare il funzionamento del dispositivo.

- Quando è in funzionamento, la spia Start/Stop si illuminerà di verde.

- Quando è in pausa o in stand-by, la spia di Start/Stop si illuminerà di rosso.


- Funzionamento

- Il dispositivo deve essere in modalità standby con la spia di Start/Stop illuminata di rosso.

- Pulite accuratamente l'area di epidermide da trattare con il prodotto adeguato al tipo di pelle e rimuovete eventuali residui di prodotto che potrebbero restare evitando così che penetrino nuovamente durante l'applicazione del trattamento a ultrasuoni.

- Applicare il gel conduttivo su tutta l'area da trattare.

- Selezionate la sonda da utilizzare (viso o occhi), il tempo di funzionamento e regolate la potenza al minimo.

- Regga con la mano il manopolo della sonda a ultrasuoni e prema . La spia Start/Stop si illuminerà di verde.

- Massaggiate la zona da trattare con piccoli movimenti circolari per tutto il tempo di trattamento precedentemente selezionato, regolando alla potenza desiderata.


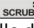
Si prega di tener presente quanto segue

- Non utilizzare mai sulla pelle asciutta. Applicare sempre una quantità di gel conduttivo sufficiente per tutta la durata dell'intero trattamento.




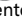

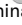






- Il tempo di trattamento non dovrebbe mai superare i 15 minuti e la potenza utilizzata non dovrebbe essere troppo alta. Regolate il tempo e la potenza a seconda dell'area di epidermide da trattare.

● Funzione peeling ultrasonico

- Accensione e configurazione

- In modalità standby, prema  per selezionare la funzione esfoliante. La spia  si illuminerà di verde e sul pannello di controllo:







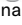





- Il timer visualizzerà 15 minuti.

- La spia di potenza visualizzerà 1.
- La spia di lavoro in forma d'onda continua  si accenderà.
- Sopra il pulsante , la spia di Start/Stop si illuminerà di rosso.
- Impostate il timer utilizzando i pulsanti  o  per impostare il tempo di funzionamento del dispositivo, in un intervallo compreso tra 1 e 30 min.
- Regolate la potenza utilizzando i pulsanti  o  per impostare la potenza della macchina, in un intervallo di potenza compreso tra 1 e 9.
- Selezione del tipo di onda: utilizzate il pulsante  per selezionare il tipo di onda.
 - Quando la spia  si accende, il tipo d'onda selezionata è quella continua.
 - Quando la spia  si accende, il tipo d'onda selezionata è quella discontinua.
 - Quando la spia  si accende, il tipo d'onda selezionata è quella a impulso.
- Utilizzate il pulsante  per avviare o stoppare il funzionamento del dispositivo.
 - Quando è in funzionamento, la spia Start/Stop si illuminerà di verde.
 - Quando è in pausa o in stand-by, la spia di Start/Stop si illuminerà di rosso.
- Funzionamento
 - Il dispositivo deve essere in modalità standby con la spia di Start/Stop illuminata di rosso.
 - Ammorbidite l'epidermide nella zona da trattare utilizzando uno spruzzatore o acqua pulita.
 - Il paziente deve reggere il bracciale con la mano.
 - Selezionate il tipo di onda da utilizzare, il tempo di funzionamento e regolate la potenza al minimo.
 - Regga con la mano la spatola e prema . La spia Start/Stop si illuminerà di verde.
 - Quindi, regolate gradualmente la potenza fino al livello necessario per il trattamento.


Si prega di tener presente quanto segue

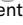- Se la spia Start/Stop lampeggia, significa che il circuito non è chiuso. Il paziente deve reggere il bracciale per un corretto funzionamento.
- Non utilizzare la spatola per raschiare la pelle per molto tempo, specialmente in caso di pelli sensibili.
- Controllate la forza che utilizzate con il rascietto durante l'operazione di raschiatura. Utilizzatela con un angolo di 45 gradi rispetto alla pelle.
- Ricordatevi di applicare del prodotto sulla pelle per mantenerla idratato mentre realizzate un

massaggio superficiale.

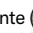



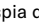

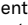

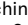








- Funzione alta frequenza
 - Accensione e configurazione
 - In modalità standby, prema  per selezionare la funzione ad alta frequenza. La spia  si illuminerà di verde e sul pannello di controllo:
 - Il timer visualizzerà 15 minuti.
 - La spia di potenza visualizzerà 1.
 - Sopra il pulsante , la spia di Start/Stop si illuminerà di rosso.
 - Impostate il timer utilizzando i pulsanti  o  per impostare il tempo di funzionamento del dispositivo, in un intervallo compreso tra 1 e 30 min.
 - Regolate la potenza utilizzando i pulsanti  o  per impostare la potenza della macchina, in un intervallo di potenza compreso tra 1 e 9.
 - Utilizzate il pulsante  per avviare o stoppare il funzionamento del dispositivo.
 - Quando è in funzionamento, la spia Start/Stop si illuminerà di verde.
 - Quando è in pausa o in stand-by, la spia di Start/Stop si illuminerà di rosso.
 - Funzionamento
 - Elettroterapia diretta:
 - Selezionate correttamente l'elettrodo per il trattamento, regolate il timer e abbassate al minimo la potenza.
 - Regga con la mano il manipolo ad alta frequenza e prema  fino a quando la spia di Start/Stop si illumina di verde.
 - Quindi, avvicinate l'elettrodo all'area della pelle da trattare fino a quando non viene a contatto con l'epidermide e regolate progressivamente la potenza .
 - Al termine del trattamento, riduca la potenza  e prema il pulsante  fino a quando la spia di Start/Stop si illumina di rosso e il dispositivo entra in modalità pausa.
 - A questo punto potete rimuovere l'elettrodo dal viso del paziente.
 - Elettroterapia indiretta:
 - La procedura da seguire è la stessa elencata al punto precedente, con la particolarità che il paziente deve reggere l'elettrodo di forma cilindrica con la mano fin dall'inizio del trattamento.
 - Si dovrebbe evitare che il tubo dell'elettrodo del professionista entri in contatto con il paziente.
 - Durante il trattamento il professionista deve tenere una mano a contatto con il viso del paziente.

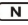Si prega di tener presente quanto segue



- Alcuni piccoli rumori indicano che l'elettrodo ad alta frequenza funziona normalmente.
- Quando si utilizza l'elettroterapia diretta, nel momento in cui il tubo dell'elettrodo si trova a meno di 2,5 cm dall'epidermide, detto tubo produrrà una scintilla. Ecco perché è necessario regolare la potenza al minimo e aumentarla progressivamente. Se anche così continuate a sentire la scintilla, potete utilizzare un panno di cotone asciutto per coprire il viso.
-  deve essere spento durante il montaggio e lo smontaggio del tubo dell'elettrodo ad alta frequenza.

● Funzione corrente galvanica

- Accensione e configurazione

- In modalità standby, preme  per selezionare la funzione a corrente galvanica. La spia  si illuminerà di verde e sul pannello di controllo:
 - Il timer visualizzerà 15 minuti.
 - La spia di potenza visualizzerà 1.
 - La spia per pelli normali  si accenderà.
 - La spia di conduzione cationica (carica positiva)  si accenderà.
- Sopra il pulsante , la spia di Start/Stop si illuminerà di rosso.
- Impostate il timer utilizzando i pulsanti  o  per impostare il tempo di funzionamento del dispositivo, in un intervallo compreso tra 1 e 30 min.
- Regolate la potenza utilizzando i pulsanti  o  per impostare la potenza della macchina, in un intervallo di potenza compreso tra 1 e 9.
- Selezione del tipo di pelle: utilizzate il pulsante  per selezionare il tipo di pelle da trattare.
 - Quando la spia  si accende, il tipo di pelle selezionata è quella "normale".
 - Quando la spia  si accende, il tipo di pelle selezionata è quella "sensibile".
 - Quando la spia  si accende, il tipo di pelle selezionata è quella "molto sensibile".
- Selezione della conduzione ionica: premete  para seleccionar la polarización.
 - Quando la spia  si accende, indica la conduzione anionica (carica negativa).
 - Quando la spia  si accende, indica la conduzione cationica (carica positiva).
- Utilizzate il pulsante  per avviare o stoppare il funzionamento del dispositivo.
 - Quando è in funzionamento, la spia Start/Stop si illuminerà di verde.
 - Quando è in pausa o in stand-by, la spia di Start/Stop si illuminerà di rosso.

- Funzionamento


- Il dispositivo deve essere in modalità standby con la spia di Start/Stop illuminata di rosso.
- Applicate il gel conduttivo o la crema dopo aver pulito la pelle da trattare.
- Selezionate il tipo di pelle da trattare, il tempo di funzionamento e regolate la potenza al minimo.
- Per selezionare correttamente la polarizzazione della conduzione ionica con il pulsante , è necessario tenere conto del valore del pH del prodotto precedentemente applicato, selezionando l'una o l'altra polarità a seconda che si tratti di un prodotto basico o acido.
- Il paziente deve reggere con la mano la barra metallica.
- Regga con la mano il manipolo della sonda galvanica e preme . La spia Start/Stop si illuminerà di verde.
- Inizi a spostare lentamente la sonda a rullo e regoli la potenza fino a raggiungere il livello necessario per il trattamento in modo graduale, mantenendo sempre una leggera sensazione di pizzicore.




Si prega di tener presente quanto segue

- Le sonde galvaniche sono intercambiabili tra loro: rullo, sfera e pulsante. Per sostituirle, con il dispositivo in modalità standby, sviti la sonda esistente e riavviti la sonda prescelta
- Quando la polarità è impostata per elettrodi positivi, ci sarà una sensazione di pizzicore determinata dalla sonda a rullo più intensa rispetto a quella determinata dall'elettrodo negativo. Selezionatelo in base alle vostre esigenze.
- La selezione della conduzione ionica da utilizzare deve essere rispettare il pH del prodotto applicato.
 - Quando la sonda agisce da carica positiva, la soluzione conduttiva deve essere acida (+).
 - Quando la sonda agisce da carica negativa, la soluzione conduttiva deve essere basica (-).
 - Se il pH non è indicato nella soluzione da utilizzare, utilizzare una cartina tornasole per il pH, per stabilirlo.
- Se la spia di Start/Stop lampeggia, significa che il circuito non è chiuso e non vi sarà conduzione ionica. Controlli che il paziente regga la barra metallica.

● Funzione spray & vacuum

- Accensione e configurazione

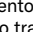

- In modalità standby, preme il pulsante  per selezionare la funzione nebulizzazione e aspirazione. La spia [SPRAY VACUUM] si illuminerà di verde e sul pannello di controllo:


- Il timer visualizzerà 15 minuti.
- La spia di potenza visualizzerà 9.
- Sopra il pulsante , la spia di Start/Stop si illuminerà di rosso.
- Impostate il timer utilizzando i pulsanti  o  per impostare il tempo di funzionamento del dispositivo, in un intervallo compreso tra 1 e 30 min.

- Utilizzate il pulsante  per avviare o stoppare il funzionamento del dispositivo.

- Quando è in funzionamento, la spia Start/Stop si illuminerà di verde.
- Quando è in pausa o in stand-by, la spia di Start/Stop si illuminerà di rosso.

- Funzionamento

- Il dispositivo deve essere in modalità standby con la spia di Start/Stop illuminata di rosso.
- Selezionate il tempo di funzionamento.
- Funzione di nebulizzazione:
 - Reggete a mano il serbatoio spray e premete il pulsante . La spia Start/Stop si illuminerà di verde.
 - Prema delicatamente con le dita l'uscita dell'aria sulla parte superiore del serbatoio per far sì che la nebulizzazione esca dalla bocchetta.
- Funzione di aspirazione:
 - Tenete saldamente con le mani il manipolo di aspirazione, posizionatelo in posizione di lavoro e premete il pulsante . La spia Start/Stop si illuminerà di verde.
 - L'ugello della testina deve entrare a contatto con l'epidermide.
 - Premete leggermente con le dita sull'uscita d'aria del manipolo per far sì che l'aspirazione della pelle venga in contatto con la testina.

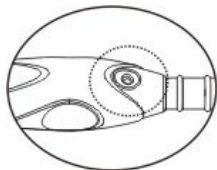

Si prega di tener presente quanto segue

- Il dispositivo deve essere messo in modalità pausa (II) quando si cambia il serbatoio o la testina di aspirazione.
- Preparate due serbatoi spray, per liquidi diversi, e potrete alternare il serbatoio in base alle vostre esigenze.

- Assicuratevi che il filtro in spugna sia installato all'estremità del manipolo prima di iniziare l'aspirazione.

- Fate attenzione al trattamento di aree come bocca, naso e occhi. Il paziente deve chiudere occhi e bocca.

- La potenza di aspirazione deve essere tenuta sotto controllo poiché un'elevata potenza potrebbe causare lesioni cutanee.

- Provate prima sulla vostra mano e poi fatelo con il paziente una volta regolata la potenza di aspirazione.

- Selezionate testine diverse per le diverse aree dell'epidermide:

- Testina piccola: per piccole aree di epidermide.



- Testina media: per aree di epidermide strette.




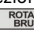
- Testina grande: per ampie aree di epidermide.




- Sostituite periodicamente il filtro a spugna con uno nuovo.

• Funzione spazzola rotante


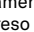
- Accensione e configurazione



- In modalità standby, preme il pulsante  per selezionare la funzione a spazzola rotante. La spia  si illuminerà di verde e sul pannello di controllo:

- Il timer visualizzerà 15 minuti.
- La spia di potenza visualizzerà 5.

- L'indicatore di rotazione in senso orario  si accenderà.

- Sopra il pulsante , la spia di Start/Stop si illuminerà di rosso.

- Impostate il timer utilizzando i pulsanti  o  per impostare il tempo di funzionamento del dispositivo, in un intervallo compreso tra 1 e 30 min.

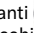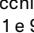- Regolate la potenza utilizzando i pulsanti  o  per impostare la potenza della macchina, in un intervallo di potenza compreso tra 1 e 9.


- Utilizzate il pulsante  per avviare o stoppare il funzionamento del dispositivo.

- Quando è in funzionamento, la spia Start/Stop si illuminerà di verde.

- Quando è in pausa o in stand-by, la spia di Start/Stop si illuminerà di rosso.

- Funzionamento

- Il dispositivo deve essere in modalità standby con la spia di Start/Stop illuminata di rosso.
- Selezionate il senso di rotazione, il tempo di funzionamento e la potenza.
- Tenete il manipolo della spazzola con la mano e

premete . La spia di Start/Stop si accenderà e il pennello inizierà a girare.

Si prega di tener presente quanto segue

- Prima di iniziare il trattamento, verificate che la spazzola sia stata inserita correttamente.
- Se durante il funzionamento del dispositivo viene selezionato un cambio di direzione di rotazione, il dispositivo entrerà in modalità di sicurezza e dopo aver arrestato la rotazione, inizierà a ruotare nella nuova direzione.
- Rallentate al minimo prima di toccare la pelle del paziente.
- Aumentate gradualmente la velocità fino a raggiungere la velocità desiderata.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di procedere alla pulizia del dispositivo, scollegatelo dalla rete elettrica.
- Pulite il dispositivo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzate liquidi per pulirlo.
- Dopo ciascun utilizzo, i diversi componenti e i diversi accessori devono essere sterilizzati e asciugati.
- Per la manutenzione o la riparazione di una qualsiasi parte del prodotto, è necessario che contattiate il vostro rivenditore o un tecnico specializzato.

SMALTIMENTO

Se dovesse rendersi necessario smaltire il prodotto o una qualsiasi delle sue parti o dei suoi accessori, siete pregati di consultare e rispettare le leggi e i regolamenti applicabili alla gestione dei rifiuti e alla protezione ambientale.



→
REF. AT105050H
TORRE MULTIFUNZIONE
9 IN 1



**CARATTERISTICHE
TECNICHE**



Potenza:	900 W
Frequenza:	50/60 Hz
Tensione:	220-240 V
Peso:	27,7 kg

INCLUDE



- Vaporizzatore digitale viso H1106
- Lampada ingrandimento LED H6001T
- Ultrasuoni
- Peeling ultrasonico
- Alta frequenza
- Spazzola rotante
- Corrente galvanica
- Spruzzo
- Aspirazione

CERTIFICAZIONI



- 2014/30/EU EMC
- 2014/35/EU LVD
- 2011/65/EU Rohs