

IT

Manuale d'istruzioni

# BROSSAGE

## AVVERTENZE

- Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni della macchina. Se fosse necessaria un'ispezione, mettersi in contatto con il fornitore o un tecnico specializzato.

- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, quali zone di acqua, bagni, ecc. in modo da prevenire danni degli elementi elettrici dell'apparecchiatura.

- Non utilizzare mai l'apparecchio all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero causare danni.

- Se il cavo elettrico fosse rotto, chiedere al distributore di fornirne un altro per evitare rischi.

- Non lasciare le sonde ultrasuoni accese senza controllo perché potrebbero surriscaldarsi e causare danni alla sonda o diminuire la loro vita utile.

- Non provare a separare il generatore di acciaio inossidabile dal suo manico di gomma; qualsiasi tentativo di farlo potrebbe causare danni irreparabili al generatore.


## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Questo prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2014/35/EU

2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU

## RICICLAGGIO

 Quando questo simbolo è indicato in uno qualsiasi dei nostri prodotti elettrici o nell'imballaggio, vuol dire che tali prodotti non devono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un trattamento adeguato dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento degli apparecchi elettrici. Questo procedimento aiuta a conservare l'ambiente e a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

## BENVENUTI!

Grazie per aver fatto l'acquisto. Prima d'utilizzare l'apparecchiatura, leggere attentamente le istruzioni. Inoltre, è consigliato ricevere indicazioni da un professionista per essere sicuri di utilizzare correttamente l'apparecchiatura.

L'azienda declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti dovuti a una manipolazione non corretta del prodotto.







L'azienda si riserva il diritto di correggere le informazioni sugli apparecchi senza previo avviso. Se riscontrate errori in queste istruzioni, vi preghiamo di scriverci un'e-mail affinché possiamo correggerle.

## CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO



- Questi elementi sono soggetti a modifiche senza previo avviso.

- L'aspetto del prodotto può differire dall'immagine.

N°	PRODOTTO	REF.	QUANT.
1	SPAZZOLE ROTANTI		1
2	TESTINA 1		1
3	TESTINA 2		1
4	TESTINA 3		1
5	TESTINA 4		1
6	TESTINA 5		1
7	UNITÀ PRINCIPALE	-	1
8	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA	-	1

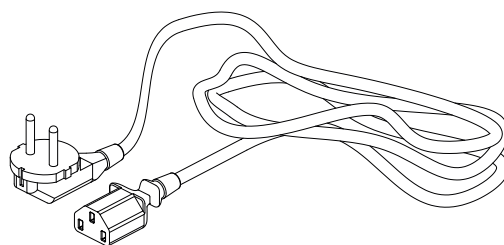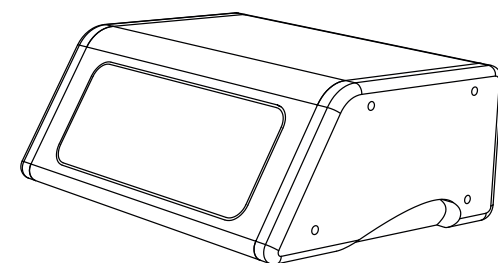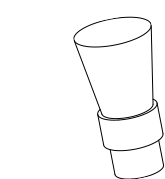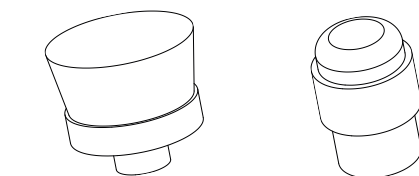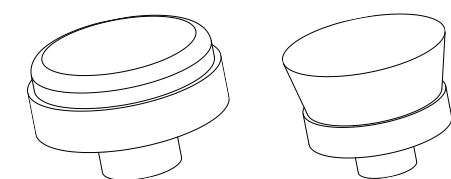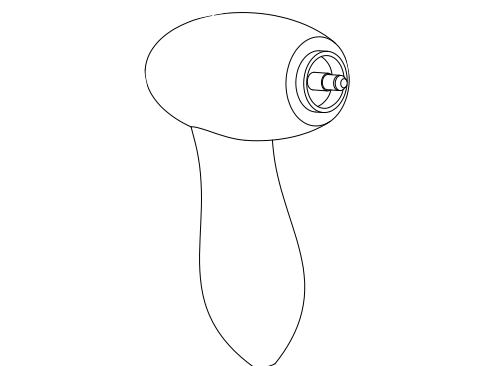

## PANELLO FRONTALE /PANELLO POSTERIORE

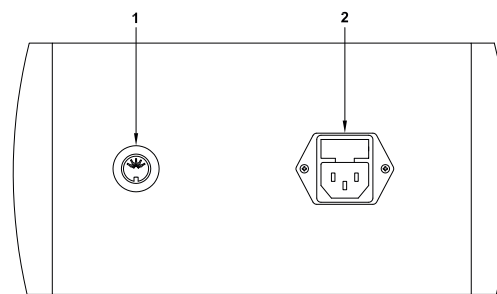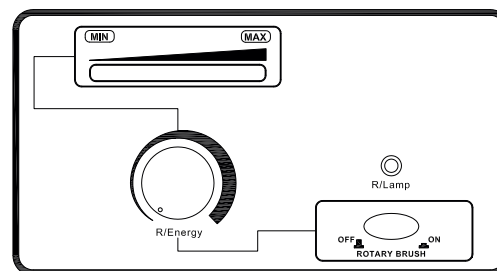

1. Manico rotante

2. Cavo alimentazione elettrica

## ISTRUZIONI DI UTILIZZO

### PRIMA DEL TRATTAMENTO

1. Massaggiare la superficie della pelle con una spugna umida.

2. Usare un vaporizzatore (o un panno caldo) per ammorbidire la superficie della pelle nell'area destinata al trattamento.


3. Successivamente al trattamento di pulizia della pelle, è consigliato applicare dell'olio nutritivo sulla superficie della pelle da trattare.

### INIZIO DEL TRATTAMENTO

1. Connettere i cavi d'alimentazione nel pannello posteriore, indicato nello schema come "POWER LINE INPUT".

2. Connettere gli accessori correttamente nel pannello frontale/posteriore come indicato nello schema.

3. Scegliere la testina appropriata in base al tipo di pelle del paziente. In generale, la pelle delicada o secca necessita di una testina più morbida, mentre le testine più dure sono ideali per i tipi di pelle ruvida o grassa.

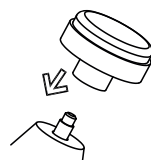

4. Accendere il "ROTARY BRUSH".

5. Impostare la potenza desiderata mediante la manovella "R/ENERGY", mentre si sta afferrando il manico. La velocità di rotazione aumenterà all'aumentare dell'angolo di regolazione.

## PRECAUZIONI

- Non premere troppo la testina dell'apparecchio mentre è in funzione.

- Non utilizzare l'apparecchio con alcuna sostanza acida o alcalina.

- Dopo il trattamento, spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo d'alimentazione.

- Questa funzione non può essere utilizzata con clienti che soffrono di ipersensibilità della pelle o di dermatite.

- Se i vasi capillari della pelle sono danneggiati, non effettuare una pulizia della pelle con questa funzione.

## MANUTENZIONE

- Dopo il trattamento, immergere la testina del prodotto in acqua distillata con un pó di detergente per 5 minuti. Dopo averlo risciacquato, immergerlo in dell'alcool per mezz'ora.

- Sterilizzare la testina tramite radiazione ultravioletta, dopodichè conservare il prodotto nel suo imballaggio originale.

## SCHEDA TECNICA

Peso e dimensioni	Dimensione imballaggio (cm)	36x31x18,5
	Peso lordo (Kg)	4,3
	Dimensioni terminale (cm)	24x23x13
Caratteristiche di lavoro	Velocità di rotazione	0 - 550 RPM
Caratteristiche elettriche	Voltaggio nominale	220V ~ 240V
	Frequenza	50Hz/60Hz
	Potenza nominale	25 W