

2 IN 1

Peeling ultrasonico e  
microdermoabrasione  
con punte di diamante

---

## Avvertenza

- Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni all'apparecchiatura. Qualora dovesse essere necessaria un'ispezione, mettersi in contatto con il fornitore o con un tecnico specializzato.
- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, onde evitare di danneggiarne gli elementi elettrici.
- Non utilizzare mai l'apparecchiatura all'aperto: gli agenti meteorologici potrebbero danneggiarla.
- Qualora il cavo elettrico dovesse essere rotto o danneggiato, chiederne uno in sostituzione al distributore onde evitare eventuali rischi.

---

## Reciclaggio

Quando questo simbolo è indicato in uno qualsiasi dei nostri prodotti elettrici o nell'imballaggio, vuol dire che tali prodotti non devono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un trattamento adeguato dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento degli apparecchi elettrici. Questo procedimento aiuta a conservare l'ambiente e a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

---

## Dichiarazione di conformità CE

Il presente prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:


1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2014/35/EU
2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU

---

## Benvenuti!


Grazie per aver effettuato l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni. Inoltre, è consigliato ricevere indicazioni da un professionista per essere sicuri di utilizzare correttamente l'apparecchio. L'Azienda declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti dovuti a una manipolazione non corretta del prodotto. L'Azienda si riserva il diritto di correggere le informazioni sugli apparecchi, senza previo avviso. Se riscontrate degli errori in queste istruzioni, vi preghiamo di scriverci un'e-mail affinché possiamo correggerli.

## PANNELLO FRONTALE

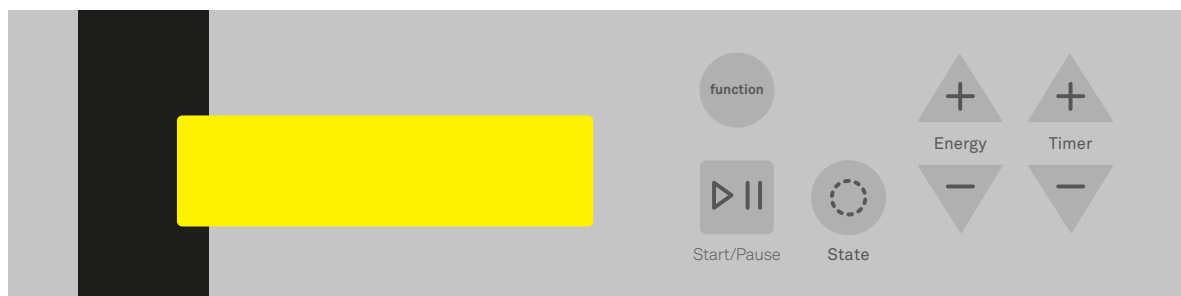

### Istruzioni d'uso

1. Connettere il cavo d'alimentazione nella parte posteriore dell'apparecchiatura accanto al tasto "POWER".
2. Connettere gli accessori correttamente nella parte posteriore dell'apparecchiatura, come indicato nello schema sottostante.

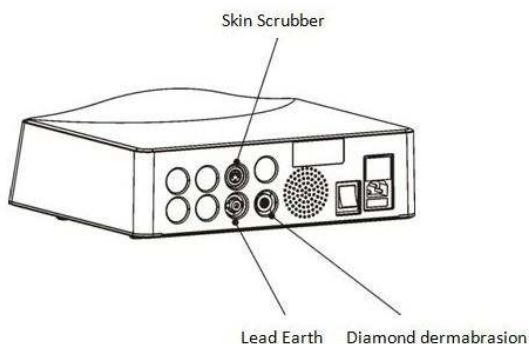

3. Accendere l'apparecchiatura mediante il tasto "POWER".
4. Premere il tasto "FUNCTION" per selezionare la funzione desiderata secondo il seguente ordine: peeling ultrasonico, microdermoabrasione con punte di diamante.

### Note

Un impianto di terra salvavita entrerà in funzione nel momento in cui l'apparecchiatura sarà attiva. Ciò significa che, qualora il dispositivo non riuscisse a convogliare verso il terreno le correnti di guasto (la sonda non tocca il paziente) il sistema taglierà la corrente automaticamente. Viceversa, nel caso in cui l'apparecchiatura riuscisse a convogliare verso il terreno le correnti di guasto (la sonda tocca il paziente) il sistema riattiverà la corrente immediatamente ed automaticamente. Tale meccanismo di sicurezza non è da confondersi con un problema o errore del sistema.

### SKIN SCRUBBER

1. Collocare il braccialetto impregnato di gel conduttore sul polso del paziente.
2. Applicare generosamente del gel conduttore sulla superficie della pelle.
3. Selezionare il tipo di onda desiderato premendo il tasto "STATE", la potenza tramite il tasto "ENERGY" e la durata del trattamento premendo il tasto "TIMER". È possibile cambiare e regolare queste impostazioni in qualsiasi momento durante il trattamento.
4. Premere "START/PAUSE" per iniziare. Appena il circuito tra la spatola ed il cliente si sarà chiuso l'apparecchiatura inizierà a lavorare. Il simbolo dello scrubber sul display lampeggerà. Nel momento in cui si separa la spatola dalla pelle del paziente, l'apparecchiatura entra automaticamente in pausa (va in stand-by), e, viceversa, riprende a funzionare quando la spatola entra nuovamente in contatto con la pelle.

### Precauzioni

- Le persone che soffrono di malattie coronariche, malattie infettive, di ipersensibilità, o che abbiano una protesi metallica, non possono sottomettersi a questo tipo di trattamento.
- Non lasciare la spatola nella stessa posizione troppo a lungo per evitare possibili bruciate.
- Manipolare la sonda con molta cautela, data la presenza di componenti delicate. Prestare particolare attenzione alla punta della sonda. poiché qualsiasi danno potrebbe provocare delle ferite alla pelle.

## DIAMOND DERMABRASION

1. Connettere correttamente un lato del tubo alla parte posteriore dell'unità principale.

2. Connettere il lato opposto del tubo al manipolo di suzione. Collocare la testina a punta di diamante nel manipolo. Ci sono 9 tipi di testine:

Ø 22 MM	
D100	Corporale. Indicato per acne, ginocchia, gomiti ed aree con smagliature
D180	

Ø 19 MM	
D180	Viso. Indicato per macchie grandi, pori, invecchiamento per esposizione solare
D220	


Ø 15 MM	
D100	Cicatrici, linee fini ed imperfezioni
D200	
D250	

Ø 8 Y 6 MM	
D200	Contorno occhi e laterali del naso.
D250	Rughe, acne e punti neri

3. Verificare che il filtro di gommapiuma (filtro 2) sia nella posizione corretta all'interno del manipolo.

4. Verificare che il filtro di metallo (filtro 1) sia nella posizione adeguata all'interno del manipolo.

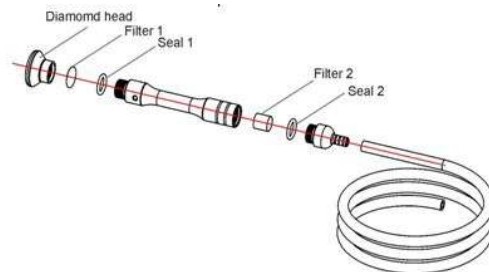

5. Impostare l'effetto di suzione tramite il tasto "ENERGY".

6. Regolare l'effetto di suzione tappando o stappando il foro nel lato del manipolo con il dito.

7. Premere "START/PAUSE" per cominciare il trattamento.

## Precauzioni

- Non lasciare il manipolo troppo a lungo nella stessa zona onde evitare eventuali lesioni della pelle.
- Evitare l'uso su pelli irritate.
- Le seguenti aree della pelle non sono adeguate per questo tipo di trattamenti: tumori della pelle, nei, marche, angiomi, labbra, occhi, herpes e verruche.
- Non lasciare la pompa di suzione attiva per periodi prolungati senza tempi di raffreddamento tra un trattamento e l'altro, onde evitare il surriscaldamento della pompa ed eventuali danni all'apparecchiatura. I danni causati per surriscaldamento della pompa non sono coperti dalla garanzia del fabbricante.

---

## **FAQ**

### **Peeling Ultrasonico**

Nel caso in cui la spatola dovesse smettere di funzionare improvvisamente, considerare che:

- Se si distacca la spatola dalla pelle, essa smetterà di funzionare dopo 5 secondi. Si tratta di un meccanismo di sicurezza, da non confondere con un problema del sistema.
- Quando la spatola entrerà nuovamente in contatto con la pelle del paziente, essa riinizierà a funzionare dopo 5 secondi.

### **Microdermoabrasione con punte di diamante**

Se l'effetto di suzione si riduce:

- Sostituire i filtri di metallo e i filtri di gommapiuma.

---

## **MANUTENZIONE**

### **Peeling Ultrasonico**

- Eliminare immediatamente qualsiasi macchia di olio presente sulla spatola.
- Dopo l'utilizzo, pulire la spatola e conservarla nell'apposita custodia.
- Conservare la spatola con cura per evitare di danneggiarla.

### **Microdermoabrasione con punte di diamante**

- I filtri di gommapiuma e i filtri di metallo presenti nel manipolo devono essere cambiati ogni 5 trattamenti. Smontare il manico e sostituire i filtri. Quindi rimontare il manipolo.
- Pulire e disinfettare le teste di diamante dopo ogni trattamento.