

IT

Manuale d’istruzioni

ALTA FREQUENZA E GALVANICO

AVVERTENZA

• Non aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni dell'apparecchio. Qualora fosse necessaria un'ispezione, contattate il fornitore o un tecnico specializzato.

• Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, quali zone di acqua, bagni, ecc. in modo da prevenire danni agli elementi elettrici.

• Non utilizzare mai l'apparecchio all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero causare danni.

• Se il cavo elettrico è rotto, chiedere a un professionista di fornire altro e modificarlo per evitare rischi, oppure contattare il fornitore.


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE








Questo prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2014/35/EU.


2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU.

RICICLAGGIO

 Quando questo simbolo è indicato in uno qualsiasi dei nostri prodotti elettrici o nell'imballaggio, vuol dire che tali prodotti non devono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un trattamento adeguato dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento degli apparecchi elettrici. Questo procedimento aiuta a conservare l'ambiente e a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

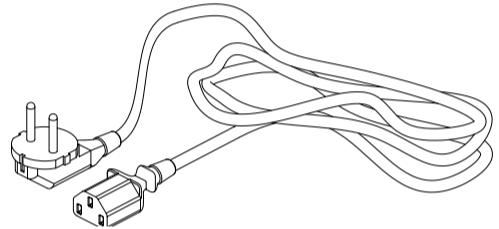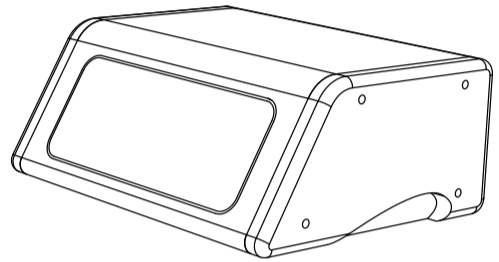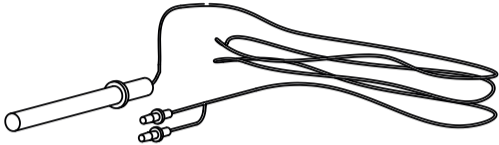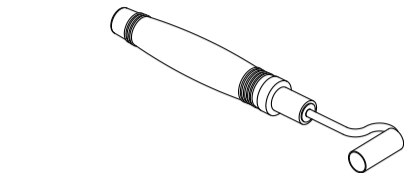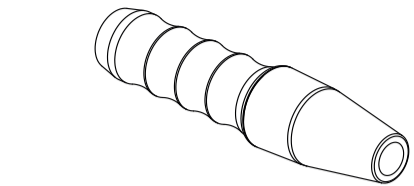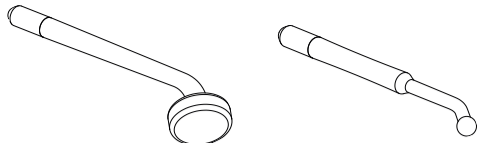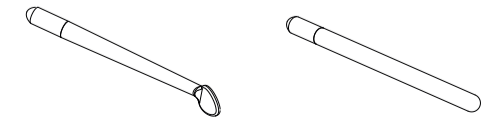

PANNELLO FRONTALE

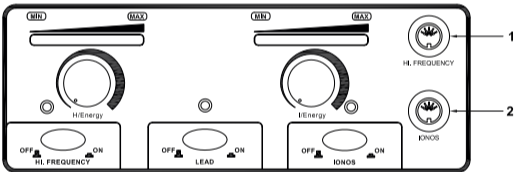

1. Manipolo alta frequenza
2. Manipolo galvanico

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

1. Connettere il cavo d'alimentazione nella parte posteriore.

2. Connettere gli accessori correttamente nel pannello frontale/posteriore.

ALTA FREQUENZA

1. Selezionare l'elettrodo di cristallo adeguato e inserire l'estremo di metallo nella bocca del manico (cercare di non toccare l'elettrodo di vetro con le mani o con oggetti metallici).

Scelta degli elettrodi:

a) Elettrodo a forma di fungo: indicato per le grandi aree di pelle (viso, fronte, collo).

b) Elettrodo a forma di cucchiaino: per le zone intermedie del viso (mento).

c) Elettrodo a forma di palla: usato per piccole zone della pelle (naso).


d) Elettrodo tubo: per il trattamento indiretto.

2. Accendere l'apparecchio premendo il tasto "H.FREQUENCY" e assicurarsi che "H.ENERGY" sia al minimo.

3. Toccare l'area di trattamento con l'elettrodo di vetro. È quindi possibile regolare la potenza a poco a poco con il tasto "H.ENERGY".

4. Durante il trattamento se si cambia l'elettrodo, si deve prima mettere la potenza al livello minimo, e dopo, regolare il livello di energia lentamente per raggiungere l'intensità desiderata.

5. Al termine del trattamento, abbassare gradatamente il tasto "H/ENERGY" al livello minimo di potenza. Quindi, spegnere il tasto "POWER" prima di rimuovere l'elettrodo dal viso del cliente.

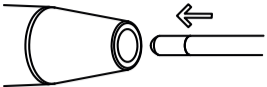

USO INDIRECTO

1. Selezionare l'elettrodo retto e inserirlo nel manico.

2. Dare il manico al cliente, assicurando che lo tenga dalla parte del cristallo.

3. Accendere l'apparecchio tramite il tasto "H.FREQUENCY" e assicurare che "H.ENERGY" sia al minimo.

4. Selezionare la potenza desiderata col tasto "H.ENERGY".

5. Realizzare il massaggio facciale o il trattamento col prodotto adeguato. Durante il trattamento ci si deve assicurare di non toccare l'elettrodo di cristallo tenuto dal cliente.

6. Alla fine del trattamento, ridurre lentamente "H.ENERGY" alla potenza minima e dopo spegnere l'apparecchio tramite "H.FREQUENCY".

PRECAUZIONI

• Il polo dell'elettrodo di cristallo, quando acceso, produce una scintilla quando è a meno di 2,5 cm dalla pelle. In questo, caso ridurre l'energia dell'alta frequenza. Se il cliente ancora sente la scintilla, si può coprire il viso con un panno secco di cotone: mai di nylon o sintetico.

• Prima di sollevare l'elettrodo di cristallo dalla pelle, si deve diminuire "ENERGY" al valore minimo e spegnere la corrente.

• I clienti non devono avere nessun oggetto di metallo o gioielli: farglieli togliere dal corpo prima di iniziare qualsiasi trattamento.



• I trattamenti di alta frequenza non si devono fare a donne in stato di gravidanza né a persone con stimolatori cardiaci (o nessun altro apparecchio elettrico di ausilio al cuore).

• I prodotti usati nel trattamento di alta frequenza non devono contenere alcool né liquidi a base di spirito, per prevenire la combustione accidentale derivata della formazione dell'arco elettrico.

• Non toccare mai l'interno dell'occhio (globo oculare) con un elettrodo di alta frequenza.

• Tenere esclusivamente il manico dell'alta frequenza.

GALVANICO

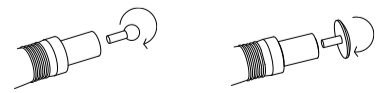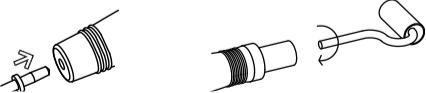

CONTROINDICAZIONI

- Stimolatori cardiaci (o alcun altro apparecchio elettrico di ausilio al cuore).
- Gravidanza
- Trombosi / flebite
- Malattie della pelle
- Interventi chirurgici (negli ultimi sei mesi)
- Impianti di silicone
- Pelle ipersensibile o lesioni vascolari

PRIMA DEL TRATTAMENTO

1.L'area di trattamento deve essere lavata e asciugata prima di qualsiasi prodotto possa penetrare il tessuto cutaneo.

2.Il cliente tiene la barra metallica e l'estetista tiene il manipolo roll.

3.La polarità delle sonde può essere cambiata regolando il "LEAD" tra (R +) o (-G).

4.Coprire il rullo / sfera con un pezzo di cotone o spugna imbevuta d'una lozione adatta (secondo il trattamento). La lozione può anche essere applicata direttamente sulla pelle.

INIZIO DEL TRATTAMENTO:

1.Attivare "IONOS" e assicurare che il controller "I/ENERGY" è impostato al minimo.

2.Selezionare l'operazione premendo "LEAD".

3.Toccare la parte trattata con il rullo / sfera.

4.Lentamente regolare col tasto "I/ENERGY" la giusta intensità in cui il cliente si sente comodo. Far scorrere il rotolo senza problemi. Il cotone dovrebbe mantenere la sua umidità tutto il trattamento per un risultato ottimale.

Polo positivo (anodo)	Polo negativo (catodo)
+R	-G
Rullo/palla (+), polo metallico (-)	Rullo/palla (-), polo metallico (+)
Soluzioni con Ph acido	Soluzioni con Ph alcalino

PRECAUZIONI

• Assicurarsi sempre che i clienti rimuovono gioielli, e confermare che non hanno impianti metallici (viti nelle articolazioni, ecc.) dal suo ultimo trattamento.

• Le donne incinte e le persone con pelle sensibile, cute rotta, gonfia o con capillari espansi, non devono ricevere questo trattamento.

• I clienti con problemi di salute come le malattie cardiache o infettive, pelli ipoallergeniche o ipersensibili (vedere Controindicazioni) non possono utilizzare questo strumento.

• Assicurarsi che la superficie della pelle è ricoperta da abbondante prodotto conduttivo.

SCHEDA TECNICA

Pesi e dimensioni	Dimensioni imballo (cm)	39x36x18,5
	Peso lordo (kg)	4,7
	Dimensioni consola (cm)	31x17/24x13

Caratteristiche di lavoro	Potenza di lavoro (alta frequenza)	12 W
	Frequenza di lavoro (alta frequenza)	180 KHz
	Potenza di lavoro (galvanico)	5 W
	Intensità di lavoro (galvanico)	390 -1000 micro Amperes

Caratteristiche elettriche	Voltaggio nominale	220V ~ 240V
	Frequenza	50Hz/60Hz
	Potenza nominale	15 W

• Durante l'uso, il rullo non dovrebbe essere toccato dalla barra metallica. Se accade un incidente, lo strumento deve essere protetto e la corrente si spegne automaticamente. In tal caso, spegnere l'apparecchio col tasto "I/ENERGY" e avviarlo di nuovo. Per spegnere lo strumento, si prega di premere prima lo "I / ENERGIA" e poi il "IONOS".

FAQ

GALVANICO

Comprovare il seguente se i rulli della sonda non girano più:

• Smontare e pulire a fondo.

• Se il rullo continua a non funzionare correttamente, contattare il vostro distributore.

MANTENIMENTO

GALVANICO

• Fare attenzione a non danneggiare i rulli della sonda. Non usare mai sostanze abrasive per pulire i rulli, perché i danni alla sua superficie potrebbero graffiare la superficie della pelle durante il trattamento; le aree danneggiate anche possono albergare batteri e rendere più difficile la sterilizzazione.

• Al termine del trattamento, tutte le parti metalliche dei rulli devono essere pulite, sterilizzate e asciugate. Poi salvarli nel supporto per gli accessori per evitare qualsiasi danni.

ALTA FREQUENZA

• Gli elettrodi di cristallo si devono mantenere puliti e asciutti e si devono sterilizzare prima o dopo il loro utilizzo.

ACCESSORI

REF.	DESCRIZIONE
	ELETTRODO 1
	ELETTRODO 2
	ELETTRODO 3
	ELETTRODO 4
	ELETTRODO SPECIALE 1
	ELETTRODO SPECIALE 2
	ELETTRODO SPECIALE 3
	MANIPOLO ALTA FREQUENZA
	MANIPOLO GALVANICO
	CAVO GALVANICO