

4 EN 1

Microdermoabrasione  
Ultrasuoni  
Martello Freddo/Caldo  
Peeling Ultrasuono

---

## Avvertenze

- Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni all'apparecchiatura. Qualora dovesse essere necessaria un'ispezione, mettersi in contatto con il fornitore o con un tecnico specializzato.
- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, onde evitare di danneggiarne gli elementi elettrici.
- Non utilizzare mai l'apparecchiatura all'aperto: gli agenti meteorologici potrebbero danneggiarla.
- Qualora il cavo elettrico dovesse essere rotto o danneggiato, chiederne uno in sostituzione al distributore onde evitare eventuali rischi.

---

## Riciclaggio



Il seguente simbolo, se presente su uno degli apparati elettrici o nell'imballaggio, indica che tali prodotti non possono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un adeguato trattamento dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento delle apparecchiature elettriche. Tale procedimento è necessario per aiutare a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

---

## Dichiarazione di conformità CE

Il presente prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:


1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2014/35/EU
2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU

---

## Benvenuti!


Grazie per aver effettuato l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il manuale d'istruzioni. È, inoltre, consigliato seguire le indicazioni di un professionista per assicurarsi di utilizzare l'apparecchio correttamente. L'Azienda declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti dovuti a un utilizzo non corretto dell'apparecchio.

## Panello Frontale

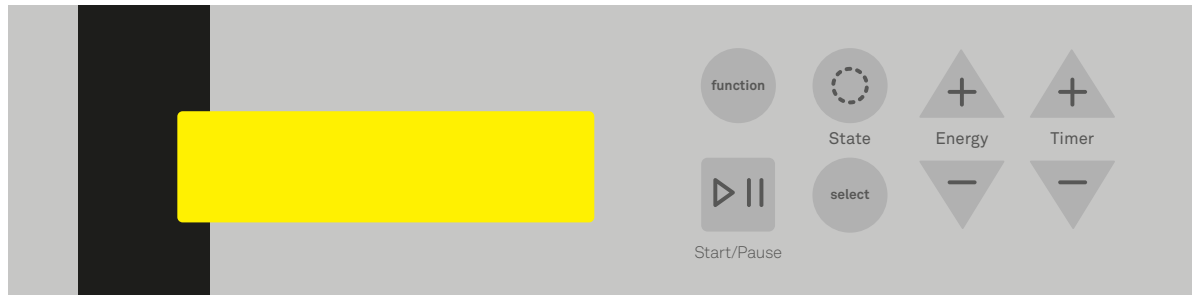

## Istruzioni d'uso

1. Connettere il cavo d'alimentazione nel pannello posteriore.
2. Collegare gli accessori nel pannello posteriore seguendo l'immagine.

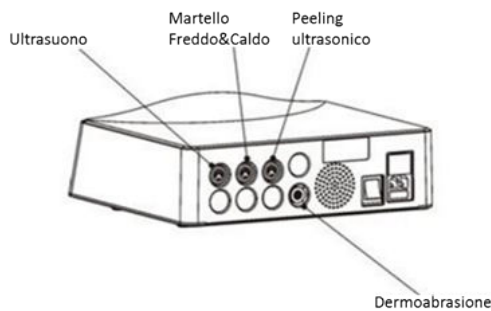

3. Accendere l'apparecchio tramite il tasto "POWER".
4. Premere il tasto "FUNCTION" per selezionare la funzione desiderata, nel seguente ordine: Peeling Ultrasonico, Ultrasuoni, Microdermoabrasione con punte di diamanti, Martello Freddo/Caldo.

## Note

Un impianto di terra salvavita entrerà in funzione nel momento in cui l'apparecchiatura sarà attiva. Ciò significa che, qualora il dispositivo non riuscisse a convogliare verso il terreno le correnti di guasto (la sonda non tocca il paziente) il sistema taglierà la corrente automaticamente. Viceversa, nel caso in cui l'apparecchiatura riuscisse a convogliare verso il terreno le correnti di guasto (la sonda tocca il paziente) il sistema riattiverà la corrente immediatamente ed automaticamente. Tale meccanismo di sicurezza non è da confondersi con un problema o errore del sistema.

## PEELING ULTRASONICO

1. Porre il bracciale sul polso della cliente.
2. Applicare generosamente il prodotto conduttore appropriato sulla superficie della pelle.
3. Selezionare il tipo di onda desiderato tramite il tasto "STATE", la potenza di uscita tramite tasto "ENERGY" e la durata del trattamento tramite il tasto "TIMER". È possibile cambiare queste impostazioni durante il trattamento.
4. Premere il tasto "START/PAUSE" per iniziare il trattamento. Una volta chiuso il circuito tra cliente e sonda, l'apparecchiatura entrerà in funzione. L'indicatore di "peeling" segnato nel display lampeggerà. Quando verrà allontanata la sonda dalla pelle della cliente, l'apparecchio entrerà in pausa e si riavvierà quando ci sarà nuovamente un contatto tra la pelle e la sonda.

## Precauzioni

- Non possono essere sottoposte a questo trattamento persone con malattie cardiache, con malattie infettive, ipersensibilità o dotate di protesi metalliche.
- Non lasciare la sonda troppo a lungo nella stessa posizione in modo da evitare possibili bruciature.
- Manipolare la sonda con molta cautela, data la presenza di componenti delicate. Prestare particolare attenzione alla punta della sonda, poiché qualsiasi danno potrebbe provocare delle ferite alla pelle.

---

## ULTRASUONO

### Prima di iniziare il trattamento

1. Disinfettare e tonificare la zona da trattare con i prodotti adeguati ad ogni tipo di pelle.
2. Rimuovere dalla pelle qualsiasi eccesso di prodotto, con l'aiuto del vaporizzatore facciale, per 10 minuti.
3. Disinfettare nuovamente l'area da trattare in modo da eliminare qualsiasi tipo di sporcizia o residuo dal viso evitandone, così, il riassorbimento nella pelle dovuto alle onde ad ultrasuoni.
4. Tonificare delicatamente tutto il viso (o l'intera zona da trattare), usando un astringente adeguato.
5. Dopo aver risciacquato l'astringente, disinfettare la pelle a fondo per ottenere una protezione ottimale.
6. Applicare abbondantemente gel conduttivo sull'intera area da trattare.

### Inizio del trattamento

1. Selezionare la sonda ad ultrasuoni tramite il tasto "SELECT", il tipo di onda necessario tramite il tasto "STATE", la potenza desiderata premendo il pulsante "ENERGY" e la durata del trattamento tramite l'opzione "TIMER". È possibile modificare queste impostazioni durante il trattamento.
2. Premere il tasto "START/PAUSE" per iniziare.

---

## Note

- Assicurarsi sempre di applicare sufficiente gel conduttivo per ogni trattamento della durata di almeno 15 minuti.
- Generalmente, la potenza più debole è utilizzata per il viso (più delicato), quella più intensa per trattamenti del corpo (meno delicati).
- Se la zona da trattare è piccola o sensibile, utilizzare la sonda oculare ed assicurarsi che l'intensità sia limitata ai blocchi di 5-7 (indicata sullo schermo da LCD "ENERGY"). La durata del trattamento, in questo caso, può essere ridotta a 8-10 minuti.
- Un pacchetto di trattamento standard ha la durata totale di circa 10 sessioni, con minimo un giorno di riposo tra una sessione e l'altra. Se dovesse esserci la necessità di eseguire altri trattamenti per il viso nella stessa zona, si dovrebbe aspettare, minimo, un periodo di riposo di 7 giorni tra un trattamento e l'altro.

---

## Precauzioni


- Non usare mai sulla pelle secca.
- Non usare mai sul ventre delle donne in stato di gravidanza.
- Non usare su persone in possesso di stimolatori cardiaci (o qualsiasi altro apparecchio elettrico di ausilio al cuore).
- Non utilizzare su persone che soffrono di malattie cardiache.
- Utilizzare sempre gli elettrodi ad ultrasuono assicurandosi che sulla pelle ci sia sufficiente gel conduttore, crema idratante o lozione.
- Il trattamento ad ultrasuoni è adeguato per ogni tipo di pelle. La durata del massaggio e la configurazione dell'apparecchiatura possono essere regolati a seconda del tipo di pelle. Per i tipi di pelle molto sensibili è necessario ridurre la durata del trattamento a 3-5 minuti ed assicurarsi che la potenza sia impostata al livello minimo prima di iniziare.

## MICRODERMOABRASIONE CON PUNTE DI DIAMANTE

1. Collegare correttamente un lato del tubo nel pannello posteriore, come indicato nell'immagine.
2. Connettere l'altro lato del tubo al manico di suzione ed inserire nel manico il capezzale di diamante indicato. Esistono nove tipi diversi di capezzali.

Ø 22mm	
D100	Corporale. Indicato per acne, ginocchia, gomiti e aree con smagliature.
D180	
Ø 19 mm	
D180	Viso. Indicato per macchie grandi, pori, invecchiamento per esposizione solare.
D220	
Ø 15 mm	
D100	Cicatrici, linee fine e diversi inestetismi.
D200	
D250	
Ø 8 e 6 mm	
D200	Occhi e d entrambi i lati del naso. Rughe, acne, brufoli e punti neri.
D250	

3. Assicurarsi che il filtro di schiuma sia correttamente posizionato all'interno del manico.
4. Controllare che il filtro di metallo sia nella posizione adeguata all'interno del manico.

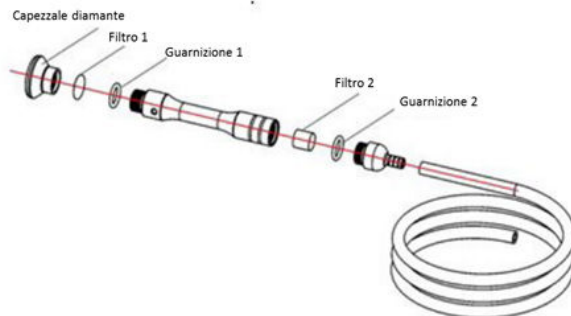

5. L'effetto di suzione può essere regolato tramite il tasto "ENERGY".
6. L'effetto di suzione può essere regolato tappando o stappando il buco nel lato del manico con il dito.
7. Premere "START/PAUSE" per iniziare il trattamento.

## Precauzioni

- Non lasciare il manico sulla stessa zona della pelle troppo a lungo, al fine di evitare possibili lesioni.
- Evitarne l'utilizzo su pelli irritate.
- Le seguenti aree della pelle non sono adeguate a questo tipo di trattamento: tumori della pelle, nei, marche, angioma, labbra, occhi, herpes e verruche.
- Non lasciare la pompa di suzione in funzione per periodi di tempo prolungati senza aspettare il necessario tempo di raffreddamento tra un trattamento e l'altro, al fine di evitare il surriscaldamento della pompa e conseguenti danni all'apparecchiatura. I danni causati per surriscaldamento della pompa non sono coperti dalla garanzia del fabbricante.

---

## MARTELLO FREDDO/CALDO

1. Premere "STATE" per selezionare tra la funzione di freddo o caldo.
2. Secondo le necessità, regolare la temperatura di uscita tramite il tasto "ENERGY" e la durata del trattamento tramite il tasto "TIMER".
3. Premere il tasto "START/PAUSE" per cominciare il trattamento.

---

## Note

- Durante il primo utilizzo, il martello freddo/caldo inizierà a funzionare 5 minuti dopo aver regolato le impostazioni.
- Dopo il primo trattamento saranno necessari 3 minuti di pausa prima di poter iniziare il trattamento successivo.
- La temperatura ambiente di lavoro ideale è di 25 gradi.
- Non ostruire le aperture di ventilazione del martello onde evitare di produrre un surriscaldamento e, di conseguenza, un cortocircuito nel sistema elettrico.
- Dopo aver premuto il tasto "START/PAUSE" per iniziare il trattamento, assicurarsi che il martello sia acceso (premere "="); in caso contrario, il martello non comincerà a lavorare.

---

## Precauzioni

1. Entrambi i lati del martello freddo/caldo sono fabbricati in lega di alluminio: evitare urti con le parti del martello.
2. Qualora le parti metalliche del martello fossero danneggiate, sostituirle con delle parti nuove.

---

## FAQ

### Peeling Ultrasonico

Improvvisamente la sonda non trasmette onde:

- Quando allontaniamo la sonda dalla pelle del cliente, essa smette di emettere onde dopo soli 5 secondi. Si tratta di un meccanismo di sicurezza da non confondere con un problema del sistema.
- Mettere nuovamente la sonda in contatto con la pelle, ed essa tornerà a funzionare dopo 5 secondi

### Ultrasuono

Seguire i seguenti procedimenti nel caso in cui l'unità di lavoro dovesse accendersi ma le sonde non dovessero trasmettere onde:

- Versare una goccia d'acqua nella sonda.
- Accendere l'apparecchiatura ed aumentare gradualmente la potenza.
- Se, a questo punto, l'acqua comincia a muoversi ed evapora, ciò sta a significare che l'apparecchiatura e le sonde funzionano correttamente. In caso contrario, vuol dire che le sonde non funzionano correttamente.

L'unità e le sonde funzionano correttamente, ma il cliente non sente alcun effetto.

- Assicurarsi che si sia applicato sufficiente gel conduttore nell'area da trattare.

### Microdemoabrasione con punte de diamante

Se l'effetto di suzione si riduce:

- Sostituire i filtri di metallo ed i filtri di schiuma.

---

## **MANUTENZIONE**

### **Peeling Ultrasonico**

- Ritirare immediatamente qualsiasi tipo di olio dalla sonda.
- Dopo l'utilizzo, disinfettare la sonda e riporla nella sua fodera per proteggerla in ogni momento.
- Conservare la sonda con cura per evitare di danneggiarla.

### **Ultrasuoni**

Le sonde ad ultrasuono devono essere disinfettate con acqua distillata (non calda) ed un panno pulito e morbido, dopodichè è necessario sterilizzarle chimicamente con un liquido di sterilizzazione adeguato. Asciugare con cura la sonda dopo la sterilizzazione, e conservarla in maniera sicura. Sterilizzare sempre le sonde nuovamente prima del nuovo utilizzo.

- Non immergere mai la sonda in nessun liquido!

### **Microdermoabrasione con punte di diamante**

- I filtri di schiuma e i filtri di metallo presenti nel manico devono essere cambiati ogni 5 trattamenti. Smontare il manico e sostituire i filtri. Quindi rimontare il manico.
- Pulire e disinfettare le teste di diamante dopo ogni trattamento.