

4 IN 1

Martello freddo/caldo
Alta frequenza
Vacuum & spray
Brossage

Avvertenze

- Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni dell'apparecchiatura. Qualora dovesse essere necessaria un'ispezione, mettersi in contatto con il fornitore o un tecnico specializzato.
- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati onde evitare di danneggiare gli elementi elettrici dell'apparecchiatura.
- Non utilizzare mai l'apparecchiatura all'aperto: gli agenti meteorologici potrebbero danneggiarla.
- Qualora il cavo elettrico dovesse essere rotto o danneggiato, chiederne uno in sostituzione al distributore onde evitare eventuali rischi.
- Non provare mai a separare il generatore di acciaio inossidabile dalla sua fodera di gomma; qualsiasi tentativo potrebbe danneggiare irreparabilmente il generatore.

Dichiarazione di conformità CE

Il presente prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2014/35/EU
2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU

Riciclaggio



Il seguente simbolo, se presente su uno degli apparati elettrici o nell'imballaggio, indica che tali prodotti non possono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un adeguato trattamento dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento delle apparecchiature elettriche. Tale procedimento è necessario per aiutare a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

Benvenuti!


Grazie per aver effettuato l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il manuale d'istruzioni. È, inoltre, consigliato seguire le indicazioni di un professionista per assicurarsi di utilizzare l'apparecchio correttamente. L'Azienda declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti dovuti a un utilizzo non corretto dell'apparecchio. L'Azienda si riserva, inoltre, il diritto di modificare o correggere informazioni sulle apparecchiature senza previo avviso. Qualora si dovessero riscontrare errori nelle presenti istruzioni, vi preghiamo di inviarci un'e-mail al fine di correggerli.

PANNELLO FRONTALE



Istruzioni d'uso

1. Inserire la presa del cavo di alimentazione nell'apposito collegamento sul pannello posteriore.
2. Connettere gli accessori correttamente nella parte posteriore del dispositivo come indicato nello schema sottostante.

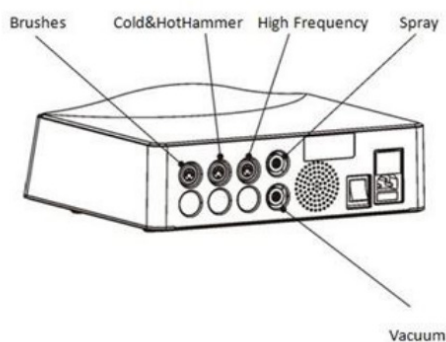

3. Premere il tasto "POWER" per accendere l'apparecchiatura.
4. Premere il tasto "FUNCTION" per selezionare una delle funzioni, che si trovano nel seguente ordine: Skin Scrubber (Spatola Peeling ad ultrasuoni), Ultrasonic (Ultrasuoni), Galvanic (Corrente Galvanica), Magic Hand & Lifting (Guanti e Bio-Lifting).

ALTA FREQUENZA

1. Selezionare l'elettrodo di vetro adeguato e inserire l'estremo di metallo nella bocca del manipolo (cercare di non toccare l'elettrodo di vetro con le mani o con oggetti metallici).

Sceita degli elettrodi:

- a. Elettrodo a forma di cipolla: indicato per aree grandi di pelle (viso, fronte, collo).
- b. Elettrodo a forma di cucchiaino: per le zone intermedie del viso (mento).
- c. Elettrodo a forma di sfera: usato per le piccole zone della pelle (naso).
- d. Elettrodo retto: usato per il trattamento indiretto.

2. Accendere l'apparecchiatura premendo il tasto "POWER" e assicurarsi che la potenza "ENERGY" sia al minimo. Selezionare il tempo di trattamento desiderato attraverso i tasti "TIME".
3. Premere il tasto "START / POWER" per iniziare il trattamento.
4. Quando l'elettrodo si trova a circa 2,5 cm di distanza dalla pelle emette una scintilla. Quindi, onde evitar ciò, per iniziare il trattamento il professionista deve accompagnare l'elettrodo toccandolo con il dito, e toglierlo una volta che l'elettrodo tocca la pelle. A questo punto è possibile regolare la potenza a poco a poco con i tasti "ENERGY".
5. Durante il trattamento se si cambia l'elettrodo, è prima necessario impostare la potenza al minimo, per poi aumentarla lentamente fino a raggiungere l'intensità desiderata.
6. Al termine del trattamento, abbassare gradualmente la potenza attraverso i tasti "ENERGY". Quindi, spegnere l'apparecchiatura attraverso il tasto "POWER" prima di rimuovere l'elettrodo dal viso del paziente.

Uso indiretto

- 1.** Selezionare l'elettrodo retto e inserirlo nel manipolo.
- 2.** Il paziente dovrà impugnare il manipolo assicurandosi che tocchi la parte di vetro dell'elettrodo.
- 3.** Accendere l'apparecchiatura tramite il tasto "POWER" e assicurarsi che la potenza sia al minimo attraverso i tasti "ENERGY".
- 4.** Selezionare il tempo desiderato con i tasti "TIME". Premere "START/STOP" per iniziare il trattamento. Selezionare gradualmente la potenza tramite il tasto "ENERGY".
- 5.** Effettuare il massaggio facciale o il trattamento con un prodotto adeguato. Durante il trattamento assicurarsi di non toccare l'elettrodo di vetro impugnato dal paziente. L'estetista sentirà una corrente mite durante il massaggio.
- 6.** Alla fine del trattamento, ridurre lentamente la potenza al minimo attraverso i tasti "ENERGY", e spegnere l'apparecchiatura tramite il tasto "POWER".

Precauzioni

- Nell'uso diretto, se il paziente nota ancora la scintilla nonostante l'estetista abbia accompagnato l'elettrodo con il dito, e nonostante la potenza sia al minimo, è possibile coprire il viso del paziente con un panno asciutto di cotone che in nessun caso deve essere di nylon o sintetico.
- Prima di sollevare l'elettrodo di cristallo dalla pelle, diminuire la potenza al minimo e spegnere l'apparecchiatura.
- Il paziente non deve portare nessun oggetto di metallo o gioiello: farglieli togliere dal corpo prima di iniziare il trattamento.
- I trattamenti di alta frequenza non si devono effettuare su donne in stato di gravidanza né a persone con stimolatori cardiaci (o nessun altro apparecchio elettrico di ausilio al cuore).
- I prodotti usati nel trattamento di alta frequenza indiretto non devono contenere alcool, onde prevenire la combustione accidentale derivata della formazione dell'arco elettrico.
- Non toccare mai l'interno dell'occhio (globo oculare) con un elettrodo di alta frequenza.

VACUUM & SPRAY

Suzione

1. Controllare che il filtro di schiuma sia nella sua posizione corretta nel manico.
2. Selezionare il "VACUUM" per avviare la pompa di aspirazione.
3. Collegare il tubo d'aria di aspirazione ai bocchini di vuoto adatti sul lato della macchina, e quindi collegare l'altra estremità dei tubi al manico di suzione. S'includono tre teste di vetro, che danno la possibilità di fare tutte le operazioni di aspirazione del viso.
4. Regolare "ENERGY" e "TIMER" per le vostre esigenze.
5. Premere il tasto "START/PAUSE" per iniziare il trattamento.
6. Si può regolare la suzione coprendo o stappando il buco laterale del manipolo con il dito.

Nota

Normalmente, l'operazione non dovrebbe durare più di 5 minuti, se l'apparecchiatura si surriscalda, scollegare tutti i pulsanti e riavviare dopo 10 minuti.

Polverizzazione

1. Riempire le bottiglie col liquido di polverizzazione adeguato. Ci sono due bottiglie di aerosol che possono contenere diversi liquidi.
2. Connettere l'estremo del tubo nella bottiglia di polverizzazione.
3. Regolare "ENERGY" e "TIMER" per le vostre esigenze.
4. Premere il tasto "START / PAUSE" per iniziare il trattamento.
5. Si può regolare l'effetto di polverizzazione coprendo o stappando il vuoto superiore della bottiglia col dito.

Nota

- Polverizzare dalla fronte verso il basso. Evitare che il liquido entri nelle narici. Chiedere al cliente di chiudere gli occhi e la bocca.
- Mantenere una distanza adeguata, in modo che l'effetto sia di una soave rugiada sulla pelle.
- Normalmente, l'operazione non deve durare più di cinque minuti. Se lo strumento si surriscalda, spegnere tutti i tasti e lasciarlo fermo per dieci minuti.

Precauzioni

- Non lasciare il manipolo sulla pelle per troppo tempo, potrebbe causare lesioni.
- Evitarne l'uso su pelli irritate.
- Non utilizzare la pompa di suzione/polverizzazione per periodi prolungati. Prevedere un tempo di raffreddamento tra trattamento e trattamento, per evitare il surriscaldamento della pompa e danneggiare l'apparecchio. I danni causati per surriscaldamento della pompa non sono coperti dalla garanzia del produttore.

BROSSAGE (SPAZZOLE ROTANTI)

Prima del trattamento:

- 1.** Strofinare la superficie della pelle con una spugna umida.
- 2.** Utilizzare un vaporizzatore (o un panno caldo) per lisciare la superficie della pelle nella zona di trattamento.
- 3.** Dopo aver pulito la pelle, è consigliabile applicare dell'olio nutritivo o un prodotto esfoliante sulla superficie della pelle da trattare.

Inizio del trattamento:

- 1.** Collegare i cavi di alimentazione al pannello posteriore.
- 2.** Collegare gli accessori correttamente nel pannello anteriore / posteriore.
- 3.** Scegliere la testina appropriata in base al tipo di pelle del cliente. In generale, la pelle secca o sensibile ha bisogno di una spazzola morbida, mentre le spazzole dure possono essere usati per le pelli grasse o ruvide.
- 4.** Accendere "POWER".
- 5.** Regolare le impostazioni desiderate per "ROTATION", "ENERGY" e "TIMER".
- 6.** Premere il tasto "START/PAUSE" per iniziare il trattamento.
- 7.** Mentre tiene il manico aggiustare "ENERGY". La velocità di rotazione aumenterà, mano a mano che s'incrementa l'angolo di regolazione.

Precauzioni

- Non premere troppo la testina durante il trattamento.
- Non utilizzare l'apparecchio con qualsiasi acido o sostanza alcalina.
- Dopo il trattamento, spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione.
- Questa funzione non deve essere utilizzata sui clienti che soffrono di pelle sensibile o dermatiti.
- Se i capillari della pelle sono danneggiati, non pulirla con questa funzione.

MARTELLO FREDDO/CALDO

- 1.** Premere "STATE" per selezionare tra la funzione di freddo o caldo.
- 2.** In base alle necessità, regolare la temperatura attraverso "ENERGY", e la durata del trattamento mediante i tasti "TIMER".
- 3.** Premere "START/PAUSE" per iniziare il trattamento. Non c'è bisogno di applicare del prodotto in nessuno dei due casi.

Nota

- Nel primo utilizzo, il martello freddo/caldo inizierà a funzionare dopo 5 minuti una volta impostato.
- Dopo il primo trattamento, sono necessari 3 minuti di pausa prima del seguente trattamento.
- La migliore temperatura ambiente di lavoro è di 25° C.
- Non ostruire le fessure di ventilazione del martello visto che il martello si surriscalderebbe e potrebbe subire un corto circuito nel sistema elettrico.
- Dopo aver premuto il tasto "START / PAUSE" per iniziare il trattamento, assicurarsi che ha anche il martello giù nel "I" o "II", in caso contrario, il martello non entrerà in funzione.

Precauzioni

- I due lati del martello freddo/caldo sono fabbricati in lega di alluminio, evitare quindi dei colpi su queste parti.
- Se le parti metalliche del martello fossero sciupate, cambiarle per delle nuove.
- Non tirare troppo dal cavo elastico del martello.

FAQ

Vacuum – spray

Se l'effetto di suzione si riduce sostituire i filtri metallici e di gomma-piuma.

MANTENIMENTO

Alta frequenza

- Gli elettrodi di vetro si devono mantenere puliti e asciutti e si devono sterilizzare prima o dopo il loro utilizzo.

Vacuum – Spray

- Il filtro di gomma-piuma deve essere cambiato ogni 5 trattamenti. Smontare il manipolo e sostituire il filtro. Successivamente rimontare il manipolo.

Brossage (spazzole rotanti)

- Dopo il trattamento, sommergere la testina in acqua pulita con un po' di detergente per 5 minuti. Dopo averla risciacquato, ammollarla con dell'alcool per una mezz'ora.
- Le testine devono essere disinfettate con radiazioni ultraviolette e quindi conservate nella loro confezione originale.