



AVVERTENZA

• Non aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni dell'apparecchio. Qualora fosse necessaria un'ispezione, contattate il fornitore o un tecnico specializzato.

• Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, quali zone di acqua, bagni, ecc. in modo da prevenire danni agli elementi elettrici.

• Non utilizzare mai l'apparecchio all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero causare danni.

• Se il cavo elettrico è rotto, chiedere a un professionista di fornire altro e modificarlo per evitare rischi, oppure contattare il fornitore.

• Non lasciare le sonde di ultrasuoni accesi incustoditi, in quanto possono surriscaldarsi e causare danni alla sonda o ridurne la durata.

• Non cercare di separare il generatore di acciaio dalla sua guaina di gomma (manico), qualsiasi tentativo di farlo potrebbe causare danni irreparabili al generatore.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Questo prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2014/35/EU.

2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU.

RICICLAGGIO

Quando questo simbolo è indicato in uno qualsiasi dei nostri prodotti elettrici o nell'imballaggio, vuol dire che tali prodotti non devono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un trattamento adeguato dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento degli apparecchi elettrici. Questo procedimento aiuta a conservare l'ambiente e a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

BENVENUTI!

Grazie per aver fatto l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni. Inoltre, è consigliato ricevere indicazioni da un professionista per essere sicuri di utilizzare correttamente l'apparecchio. L'Azienda declina ogni responsabilità derivante per eventuali incidenti dovuti a una manipolazione non corretta del prodotto.

L'Azienda si riserva il diritto di correggere informazioni sugli apparecchi, senza previo avviso. Se riscontrate degli errori in queste istruzioni, vi preghiamo di scriverci un'e-mail affinché possiamo correggerli.



PANNELLO FRONTALE

- Manipolo galvanico
- Manipolo alta frequenza
- Sonda facciale
- Sonda oculare
- Tubo polverizzazione
- Tubo suzione
- Cavo alimentazione elettrica

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- Connettere il cavo d'alimentazione nella parte posteriore indicato come "POWER LINE INPUT".
- Connettere gli accessori correttamente nel pannello frontale/posteriore.
- Premere il tasto "POWER".

ALTA FREQUENZA

- Selezionare l'elettrodo di cristallo adeguato e inserire l'estremo di metallo nella bocca del manico. Cercare di non toccare l'elettrodo di vetro con le mani o con oggetti metallici.

Scelta degli elettrodi:

- a)** Elettrodo a forma di fungo: indicato per le grandi aree di pelle (viso, fronte, collo).
- b)** Elettrodo a forma di cucchiaino: per le zone intermedie del viso (mento).
- c)** Elettrodo a forma di palla: usato per piccole zone della pelle (naso).
- d)** Elettrodo tubo: per il trattamento indiretto.

- Accendere l'apparecchio premendo il tasto "H.FREQUENCY" e assicurarsi che "H/ENERGY" sia al minimo.

- Toccare l'area di trattamento con l'elettrodo di vetro. È quindi possibile regolare la potenza a poco a poco con il tasto "H/ENERGY".

- Durante il trattamento se si cambia l'elettrodo, si deve prima mettere la potenza al livello minimo, e dopo, regolare il livello di energia lentamente per raggiungere l'intensità desiderata.



- Al termine del trattamento, abbassare gradatamente il tasto "H/ENERGY" al livello minimo di potenza. Quindi, spegnere il tasto "H.FREQUENCY" prima di rimuovere l'elettrodo dal viso del cliente.

- Accendere l'apparecchio premendo il tasto "H.FREQUENCY" e assicurarsi che "H/ENERGY" sia al minimo.


- Selezionare la potenza desiderata col tasto "H/ENERGY".

- Realizzare il massaggio facciale o il trattamento col prodotto adeguato. Durante il trattamento ci si deve assicurare di non toccare l'elettrodo di cristallo tenuto dal cliente.


- Alla fine del trattamento, ridurre lentamente "H/ENERGY" alla potenza minima e dopo spegnere l'apparecchio tramite "H.FREQUENZY".

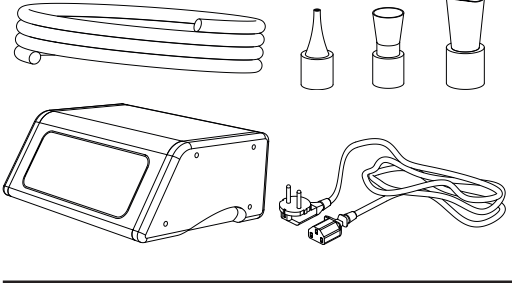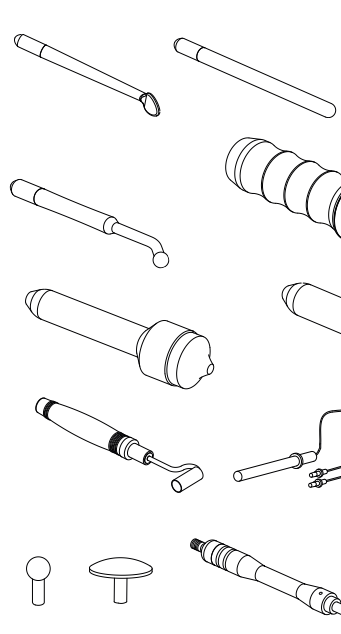

PANNELLO FRONTALE

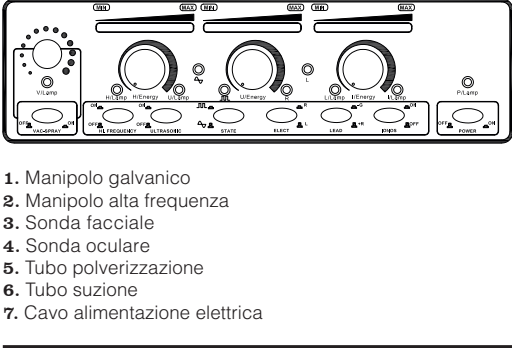

- Manipolo galvanico
- Manipolo alta frequenza
- Sonda facciale
- Sonda oculare
- Tubo polverizzazione
- Tubo suzione
- Cavo alimentazione elettrica

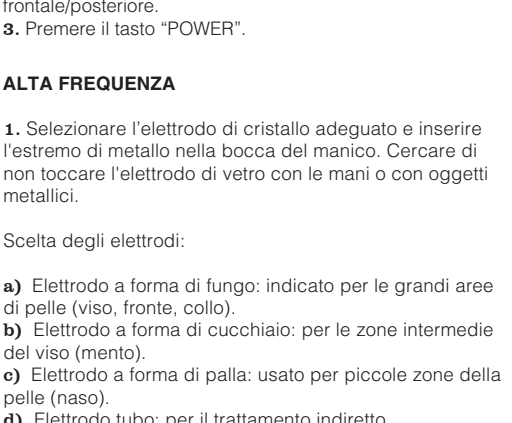

- Accendere l'apparecchio premendo il tasto "H.FREQUENCY" e assicurarsi che "H/ENERGY" sia al minimo.


- Toccare l'area di trattamento con l'elettrodo di vetro. È quindi possibile regolare la potenza a poco a poco con il tasto "H/ENERGY".

- Durante il trattamento se si cambia l'elettrodo, si deve prima mettere la potenza al livello minimo, e dopo, regolare il livello di energia lentamente per raggiungere l'intensità desiderata.

- Al termine del trattamento, abbassare gradatamente il tasto "H/ENERGY" al livello minimo di potenza. Quindi, spegnere il tasto "H.FREQUENCY" prima di rimuovere l'elettrodo dal viso del cliente.

USO INDIRECTO

- Selezionare l'elettrodo retto e inserirlo nel manico.

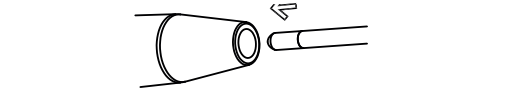


- Dare il manico al cliente, assicurando che lo tenga dalla parte del cristallo.

- Accendere l'apparecchio tramite il tasto "H.FREQUENCY" e assicurare che "H/ENERGY" sia al minimo.

- Selezionare la potenza desiderata col tasto "H/ENERGY".

- Realizzare il massaggio facciale o il trattamento col prodotto adeguato. Durante il trattamento ci si deve assicurare di non toccare l'elettrodo di cristallo tenuto dal cliente.

- Alla fine del trattamento, ridurre lentamente "H/ENERGY" alla potenza minima e dopo spegnere l'apparecchio tramite "H.FREQUENZY".

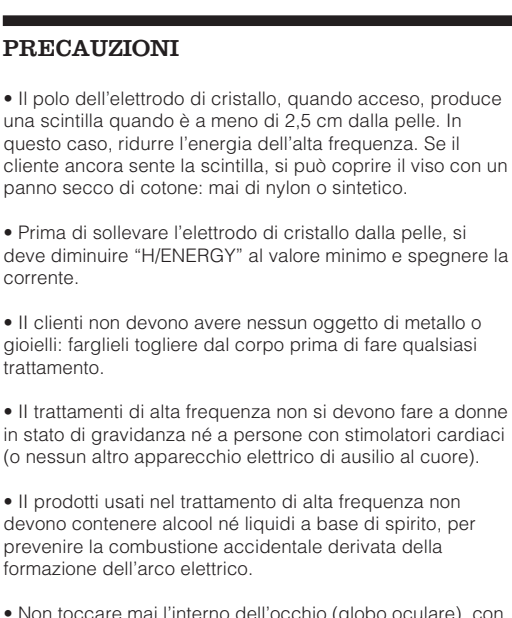

PRECAUZIONI


- Il polo dell'elettrodo di cristallo, quando acceso, produce una scintilla quando è a meno di 2,5 cm dalla pelle. In questo caso, ridurre l'energia dell'alta frequenza. Se il cliente ancora sente la scintilla, si può coprire il viso con un panno secco di cotone: mai di nylon o sintetico.

- Prima di sollevare l'elettrodo di cristallo dalla pelle, si deve diminuire "H/ENERGY" al valore minimo e spegnere la corrente.

- Il clienti non devono avere nessun oggetto di metallo o gioielli: farglieli togliere dal corpo prima di fare qualsiasi trattamento.

- Il trattamenti di alta frequenza non si devono fare a donne in stato di gravidanza né a persone con stimolatori cardiaci (o nessun altro apparecchio elettrico di ausilio al cuore).

- Il prodotti usati nel trattamento di alta frequenza non devono contenere alcool né liquidi a base di spirito, per prevenire la combustione accidentale derivata della formazione dell'arco elettrico.
- Non toccare mai l'interno dell'occhio (globo oculare), con l'elettrodo.
- Tenere unicamente il manico dell'alta frequenza.

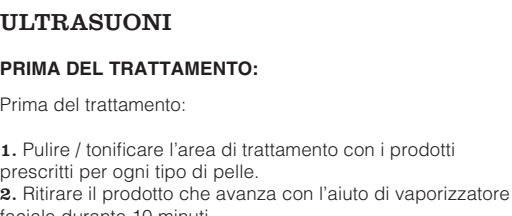

- Pulire / tonificare l'area di trattamento con i prodotti prescritti per ogni tipo di pelle.
- Ritirare il prodotto che avanza con l'aiuto di vaporizzatore faciale durante 10 minuti.
- Pulire l'area a trattare ancora una volta per eliminare ogni sporcizia o residuo nel viso in modo da evitare che le onde di ultrasuono lo restituiscono alla derma.
- Tonificare tutto il viso (o l'area a trattare) soavemente, usando un astringente adeguato.
- Dopo di risciacquare l'astringente, la pelle si pulirà profondamente per una protezione ottima.
- Applicare con abbondanza il gel conduttore sull'area di trattamento.

- Regolare l'intensità tramite il regolatore "U / ENERGY". Deve cominciare nei 3-4 blocchi nello schermo LCD.


- Selezionare lo stato di onda desiderato premendo il tasto "STATE". Ci sono tre tipi di stato di onda: onda continua, onda intermittente e onda combinata.

- Selezionare la sonda desiderata (facciale o oculare) premendo il tasto "SELECT".

- Tenere la sonda con fermezza e pulsare il tasto "START/PAUSE" per iniziare il trattamento.

- Massaggiare l'area di trattamento, dove si è applicato il gel conduttore, con piccoli movimenti circolari coprendo tutta l'area da trattare. Il tempo di trattamento può variare secondo il formato della superficie a trattare. Lo standard (completo) per la zona facciale sarebbero 10 minuti di massaggio ripetitivo.

- Una volta finito il trattamento, spegnere la corrente e ritornare la sonda alla sua posizione.

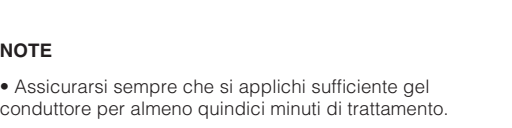

- Assicurarsi sempre che si applichi sufficiente gel conduttore per almeno quindici minuti di trattamento.

- Generalmente le potenze più basse si usano per trattamenti facciali e le più alte per i trattamenti corporali.

- Se l'area di trattamento è piccola o sensibile, usare la sonda oculare e assicurarsi che la intensità sia tra i blocchi 5 e 7 (sull'"ENERGY" dello schermo LCD). Il tempo di trattamento si può anche ridurre a 8-10 minuti.

- Un pacco di trattamento standard dura intorno a un totale di 10 sessioni, con un periodo minimo di riposo di un giorno tra sessioni. Se si portano a termine altri trattamenti faciali nella stessa zona, si deve aspettare un periodo minimo di riposo di sette giorni tra i trattamenti.

- Non usare mai sopra la pelle secca.


- Non usare mai nella zona delle donne incinta.

- Non usare con persone con un stimolatore cardiaco (o alcun altro apparecchio elettrico per regolare il cuore).

- Non usare con persone con malattie del cuore conosciute.


- Usare sempre gli elettrodi di ultrasuono con la sufficiente crema idratante sulla pelle.

- Il trattamento con ultrasuoni è adeguato per tutti i tipi di pelle. Il tempo di massaggio e la configurazione dell'apparecchio si possono aggiustare ad ogni tipo di pelle. Per pelli sensibili, ridurre il tempo del trattamento a 3-5 minuti e assicurarsi che la potenza sia al livello più basso per cominciare.

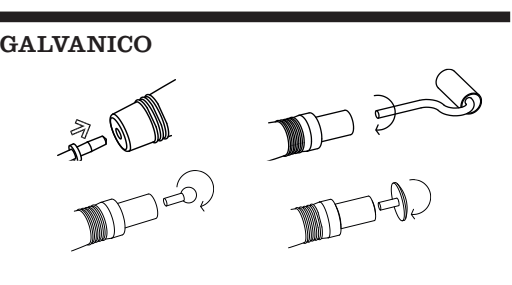

Polo positivo (anodo)	Polo negativo (catodo)
+R	-G
Rullo/palla (+), polo metallico (-)	Rullo/palla (-), polo metallico (+)
Soluzioni con pH acido	Soluzioni con pH alcalino

- Coprire il rullo/sfera con un pezzo di cotone o spugna imbevuta d'una lozione adatta (secondo il trattamento). La lozione può anche essere applicata direttamente sulla pelle.

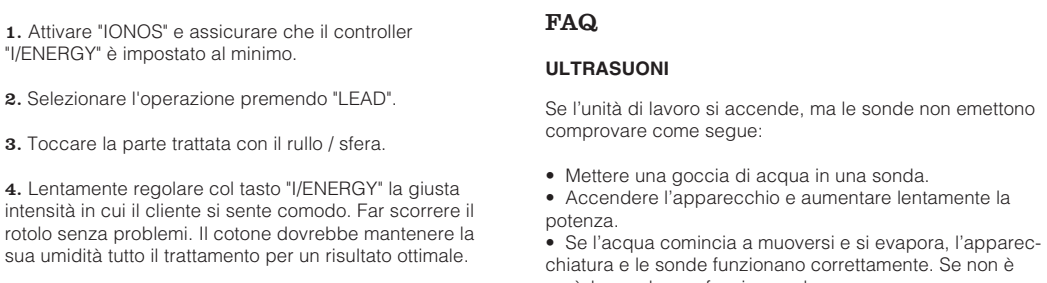



- Attivare "IONOS" e assicurare che il controller "I/ENERGY" è impostato al minimo.
- Selezionare l'operazione premendo "LEAD".
- Toccare la parte trattata con il rullo / sfera.

- Lentamente regolare col tasto "I/ENERGY" la giusta intensità in cui il cliente si sente comodo. Far scorrere il rotolo senza problemi. Il cotone dovrebbe mantenere la sua umidità tutto il trattamento per un risultato ottimale.

- Assicurarsi sempre che i clienti rimuovono gioielli, e confermare che non hanno impianti metallici (viti nelle articolazioni, ecc.) dal suo ultimo trattamento.

- Le donne incinte e le persone con pelle sensibile, cute rotta, gonfia o con capillari espansi, non devono ricevere questo trattamento.

- Durante l'uso, il rullo non dovrebbe essere toccato dalla barra metallica. Se accade un incidente, lo strumento deve essere protetto e la corrente si spegne automaticamente. In tal caso, spegnere l'apparecchio col tasto "I/ENERGY" e avviarlo di nuovo. Per spegnere lo strumento, si prega di premere prima lo "I / ENERGIA" e poi il "IONOS".

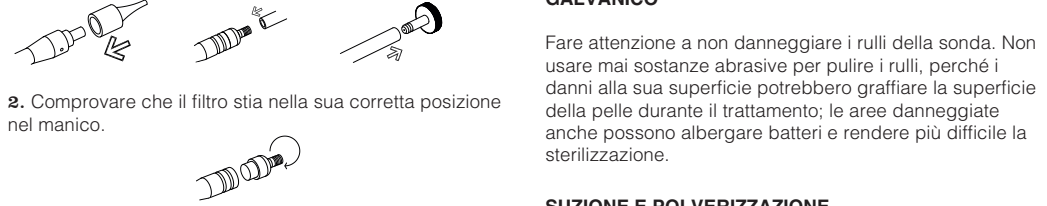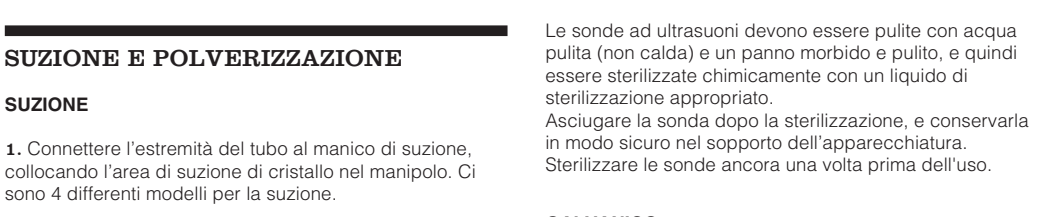

- Comprovare che il filtro stia nella sua corretta posizione nel manico.


- Accendere l'apparecchio tramite il tasto "VAC-SPRAY" nel pannello anteriore.

- Si può regolare la suzione coprendo o stappando il buco laterale del manipolo con il dito.

NOTA

Normalmente il trattamento non deve durare più di 5 minuti. Se lo strumento si surriscalda, spegnere tutti i tasti evitando di usarlo per una decina di minuti.

- Polverizzazione
 - Riempire le bottiglie col liquido di polverizzazione adeguato. Ci sono due bottiglie di aerosol che possono contenere diversi liquidi.
- Connettere l'estremo del tubo nella bottiglia di polverizzazione.

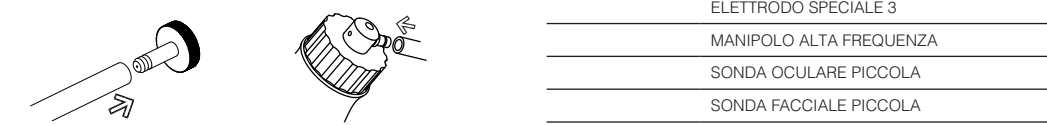

- Accendere l'apparecchio premendo il tasto "VAC-SPRAY" nel pannello frontale.


- Si può regolare l'effetto di polverizzazione coprendo o stappando il vuoto superiore della bottiglia col dito.

- NOTE
 - Polverizzare dalla fronte verso il basso. Evitare che il liquido entri nelle narici. Chiedere al cliente di chiudere gli occhi e la bocca.

- Mantenere una distanza adeguata, in modo che l'effetto sia quello di una soave rugiada sulla pelle.

- Normalmente, l'operazione non deve durare più di cinque minuti. Se lo strumento si surriscalda, spegnere tutti i tasti e lasciarlo fermo per dieci minuti.

Caratteristiche di lavoro	<p>Potenza di lavoro</p> <p>Frequenza di lavoro (ultrasuono)</p> <p>Potenza di lavoro (ultrasuoni)</p> <p>Frequenza di lavoro (alta frequenza)</p> <p>Potenza di lavoro (galvanico)</p> <p>Intensità di lavoro (galvanico)</p> <p>Pressione di suzione</p>	<p>70 W</p> <p>1 MHz</p> <p>0,01 - 0,5 W/cm2</p> <p>0,04 - 1,5 W/cm2</p> <p>180 KHz</p> <p>5 W</p> <p>380 - 1000 micro Amperes</p> <p>0 ~ -0,075 MPa</p>
Caratteristiche elettriche	<p>Voltaggio nominale</p> <p>Frequenza</p> <p>Potenza nominale</p>	<p>220V ~ 240V</p> <p>50Hz/60Hz</p> <p>80 W</p>

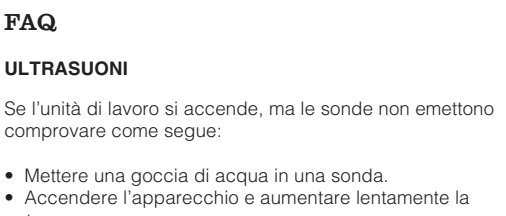

- Mettere una goccia di acqua in una sonda.
- Accendere l'apparecchio e aumentare lentamente la potenza.
- Se l'acqua comincia a muoversi e si evapora, l'apparecchiatura e le sonde funzionano correttamente. Se non è così, le sonde non funzionano bene.


Se l'unità e le sonde funzionano correttamente, però il cliente non sente nessun effetto:

- Comprovare che si sia applicato sufficiente gel conduttore nell'area da trattarsi.

- Galvanico

Comprovare il seguente se i rulli della sonda non girano più:


- Smontare e pulire a fondo.
- Se il rullo continua a non funzionare correttamente, contattare il vostro distributore.

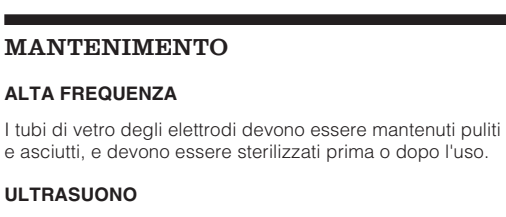

- Alta Frequenza

I tubi di vetro degli elettrodi devono essere mantenuti puliti e asciutti, e devono essere sterilizzati prima o dopo l'uso.
- Ultrasuono

Le sonde ad ultrasuoni devono essere pulite con acqua pulita (non calda) e un panno morbido e pulito, e quindi essere sterilizzate chimicamente con un liquido di sterilizzazione appropriato. Asciugare la sonda dopo la sterilizzazione, e conservarla in modo sicuro nel supporto dell'apparecchiatura. Sterilizzare le sonde ancora una volta prima dell'uso.

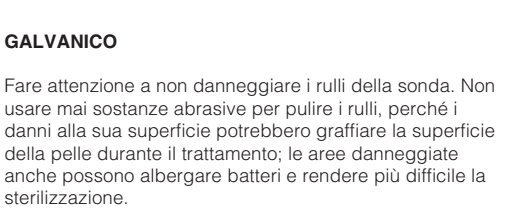

- Galvanico

Fare attenzione a non danneggiare i rulli della sonda. Non usare mai sostanze abrasive per pulire i rulli, perché i danni alla sua superficie potrebbero graffiare la superficie della pelle durante il trattamento; le aree danneggiate anche possono albergare batteri e rendere più difficile la sterilizzazione.



ACCESSORI	<p>REF.</p> <p>DESCRIPCIÓN</p>
	ELETTRODO 1
	ELETTRODO 2
	ELETTRODO 3
	ELETTRODO 4
	ELETTRODO SPECIALE 1
	ELETTRODO SPECIALE 2
	ELETTRODO SPECIALE 3
	MANIPOLO ALTA FREQUENZA
	SONDA OCULARE PICCOLA
	SONDA FACCIALE PICCOLA
	MANIPOLO GALVANICO
	CAVO GALVANICO
	TUBO
	BOTTIGLIA SPRAY
	MANIPOLO SUZIONE
	TESTATA SUZIONE 1
	TESTATA SUZIONE 2
	TESTATA SUZIONE 3

SCHEDA TECNICA	<p>Pesi e dimensioni</p> <p>Peso lordo (kg)</p> <p>Dimensioni consola (cm)</p>	<p>Dimensioni imballo (cm)</p> <p>45x36x18,5</p> <p>7</p> <p>41x17/24x13</p>
Caratteristiche di lavoro	<p>Potenza di lavoro</p> <p>Frequenza di lavoro (ultrasuono)</p> <p>Potenza di lavoro (ultrasuoni)</p> <p>Frequenza di lavoro (alta frequenza)</p> <p>Potenza di lavoro (galvanico)</p> <p>Intensità di lavoro (galvanico)</p> <p>Pressione di suzione</p>	<p>70 W</p> <p>1 MHz</p> <p>0,01 - 0,5 W/cm2</p> <p>0,04 - 1,5 W/cm2</p> <p>180 KHz</p> <p>5 W</p> <p>380 - 1000 micro Amperes</p> <p>0 ~ -0,075 MPa</p>
Caratteristiche elettriche	<p>Voltaggio nominale</p> <p>Frequenza</p> <p>Potenza nominale</p>	<p>220V ~ 240V</p> <p>50Hz/60Hz</p> <p>80 W</p>