

# CORRENTE GALVANICA

## AVVERTENZA

• Non aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni dell'apparecchio. Qualora fosse necessaria un'ispezione, contattate il fornitore o un tecnico specializzato.

• Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, quali zone di acqua, bagni, ecc. in modo da prevenire danni agli elementi elettrici.

• Non utilizzare mai l'apparecchio all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero causare danni.

• Se il cavo elettrico è rotto, chiedere a un professionista di fornire altro e modificarlo per evitare rischi, oppure contattare il fornitore.

## CONTROINDICAZIONI

- Stimolatori cardiaci (o alcun altro apparecchio elettrico di ausilio al cuore).
- Gravidanza
- Trombosi / flebite
- Malattie della pelle
- Interventi chirurgici (negli ultimi sei mesi)
- Impianti di silicone
- Pelle ipersensibile o lesioni vascolari


## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Questo prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

**1.** Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2014/35/EU.

**2.** Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU.

## RICICLAGGIO

 Quando questo simbolo è indicato in uno qualsiasi dei nostri prodotti elettrici o nell'imballaggio, vuol dire che tali prodotti non devono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un trattamento adeguato dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento degli apparecchi elettrici. Questo procedimento aiuta a conservare l'ambiente e a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

## BENVENUTI!

Grazie per aver fatto l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni. Inoltre, è consigliato ricevere indicazioni da un professionista per essere sicuri di utilizzare correttamente l'apparecchio.






L'Azienda declina ogni responsabilità derivante per eventuali incidenti dovuti a una manipolazione non corretta del prodotto. L'Azienda si riserva il diritto di correggere informazioni sugli apparecchi, senza previo avviso. Se riscontrate degli errori in queste istruzioni, vi preghiamo di scriverci un'e-mail affinché possiamo correggerli.

## CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO


• Questi elementi sono soggetti a modifiche senza previo avviso.

• L'aspetto del prodotto può differire dall'immagine.

Nr.	PRODOTTO	REF.	QUANT.
1	MANIPOLO GALVANICO (SFERA)		2
2	MANIPOLO GALVANICO (RULLO)		2
3	CAVO GALVANICO	-	1
4	UNITÀ PRINCIPALE	-	1
5	CAVO ALIMENTAZIONE	-	1

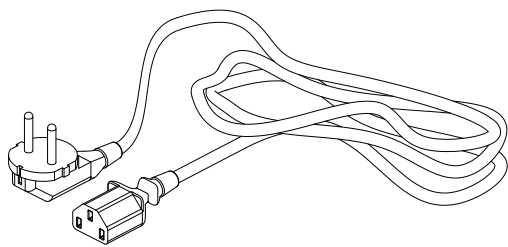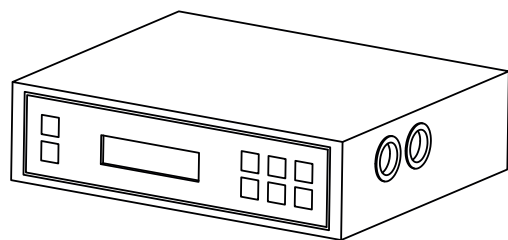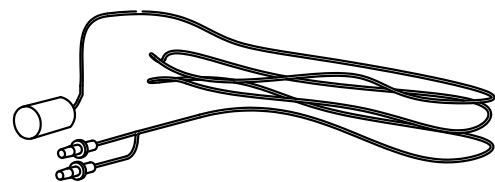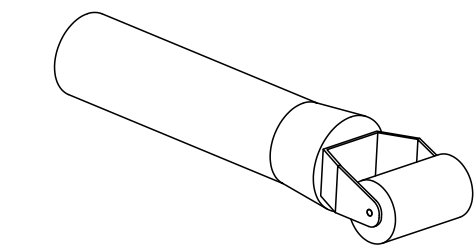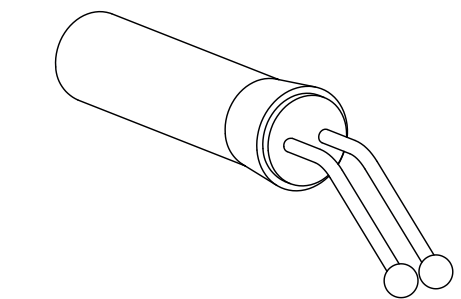

## PANELLO FRONTALE

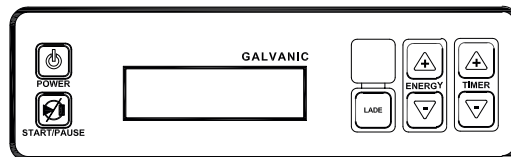

## ISTRUZIONI

**1.** Connettere il cavo d'alimentazione nella parte posteriore dell'unità.



**2.** Connettere gli accessori correttamente nella parte laterale dell'unità.

### PRIMA DEL TRATTAMENTO:

**1.** Lavare ed asciugare l'intera area da trattare per evitare che qualsiasi prodotto possa penetrare nel tessuto cutaneo.

**2.** Il cliente deve impugnare la barra di metallo ed il terapeuta la maniglia del rullo.

**3.** La polarità delle sonde può essere modificata mediante l'impostazione "LEAD" tra (+ R) o (-G).

**4.** Coprire il rullo / la sfera con un pezzo di cotone o una spugna imbevuta di una lozione adatta (a seconda del trattamento). La lozione può anche essere applicata direttamente sulla pelle.

### INIZIO DEL TRATTAMENTO:

**1.** Scegliere le sonde galvaniche desiderate (a rullo o a sfera). Quindi collegare correttamente due sonde identiche ai cavi.

**2.** Accendere l'unità mediante il tasto "POWER".

**3.** Selezionare la potenza desiderata tramite il tasto "ENERGY" e la durata del trattamento tramite il tasto "TIME". È possibile modificare ognuna di queste opzioni nel corso del trattamento.

**4.** Premere il tasto START / PAUSE

## PRECAUZIONI

• Assicurarsi che il paziente si tolga i gioielli e che non abbia nessun impianto metallico (viti nelle articolazioni, ecc.)

• Le donne incinte e le persone con pelle sensibile, o irritata o infiammata, o con i capillari dilatati non devono ricevere questo trattamento.

• I pazienti con problemi di salute come malattie cardiache o infettive, pelli ipoallergiche o ipersensibili non possono ricevere questo trattamento.

• Assicurarsi di applicare il prodotto/lozione conduttivo/a in abbondanza sulla superficie della pelle da trattare.

## FAQ

Se i rulli della sonda smettono di girare:

• Smontare e pulire a fondo.

• Si il rullo dovesser continuare a non girare, mettersi in contatto con il fornitore.

## MANTENIMENTO

• Fare attenzione a non danneggiare i rulli dei manipoli. Non usare mai delle sostanze abrasive per pulire i rulli, perché qualsiasi imperfezione sulla superficie del rullo potrebbe graffiare la pelle durante il trattamento. Inoltre, dei graffi sulla superficie del rullo possono ospitare dei batteri, rendendone quindi più difficile la sterilizzazione.

• Al termine del trattamento, tutte le parti metalliche dei rulli devono essere pulite, sterilizzate e asciugate. Dopodiché, è necessario conservare i manipoli o in un supporto apposito o in un ambiente asciutto e protetto.

## ACCESSORI

REF.	BESCHREIBUNG
	MANIPOLO GALVANICO
	CAVO ALIMENTAZIONE

## SCHEMA TECNICA

Pesi e dimensioni	Dimensioni imballo	37x27,5x14
	Peso lordo (Kg)	2,7
	Dimensioni consola (cm)	20,5x22x7
Caratteristiche di lavoro	Tempo di lavoro preestabilito	15 min
	Potenza di lavoro	5 W
	Intensità di lavoro	30 - 650 micro Amperes
Caratteristiche elettriche	Voltaggio nominale	220V ~ 240V
	Frequenza	50Hz/60Hz
	Potenza nominale	29 W