

CORRENTE GALVANICA

AVVERTENZA

• Non aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni dell'apparecchio. Qualora fosse necessaria un'ispezione, contattate il fornitore o un tecnico specializzato.

• Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, quali zone di acqua, bagni, ecc. in modo da prevenire danni agli elementi elettrici.

• Non utilizzare mai l'apparecchio all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero causare danni.

• Se il cavo elettrico è rotto, chiedere a un professionista di fornire altro e modificarlo per evitare rischi, oppure contattare il fornitore.

CONTROINDICAZIONI

- Stimolatori cardiaci (o alcun altro apparecchio elettrico di ausilio al cuore).
- Gravidanza
- Trombosi / flebite
- Malattie della pelle
- Interventi chirurgici (negli ultimi sei mesi)
- Impianti di silicone
- Pelle ipersensibile o lesioni vascolari


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Questo prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2014/35/EU.

2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU.

RICICLAGGIO

 Quando questo simbolo è indicato in uno qualsiasi dei nostri prodotti elettrici o nell'imballaggio, vuol dire che tali prodotti non devono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un trattamento adeguato dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento degli apparecchi elettrici. Questo procedimento aiuta a conservare l'ambiente e a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

BENVENUTI!

Grazie per aver fatto l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni. Inoltre, è consigliato ricevere indicazioni da un professionista per essere sicuri di utilizzare correttamente l'apparecchio.




L'Azienda declina ogni responsabilità derivante per eventuali incidenti dovuti a una manipolazione non corretta del prodotto. L'Azienda si riserva il diritto di correggere informazioni sugli apparecchi, senza previo avviso. Se riscontrate degli errori in queste istruzioni, vi preghiamo di scriverci un'e-mail affinché possiamo correggerli.

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO



• Questi elementi sono soggetti a modifiche senza previo avviso.

• L'aspetto del prodotto può differire dall'immagine.

No.	PRODOTTO	REF.	QUANT.
1	MANIPOLO GALVANICO		2
2	CAVO GALVANICO	-	1
3	ACCESSORI PER GALVANICO	-	2
4	ACCESSORI PER GALVANICO	-	2
5	UNITÀ PRINCIPALE	-	1
6	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA	-	1

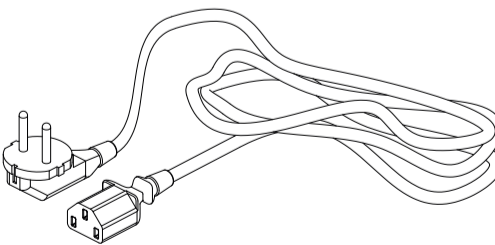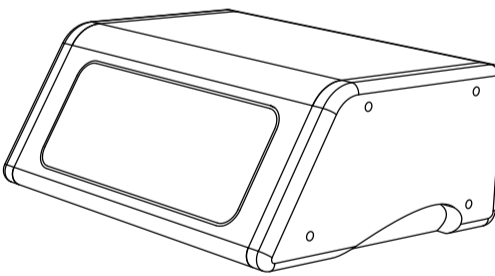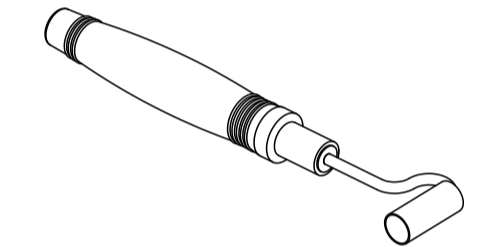

PANNELLO FRONTALE PANNELLO POSTERIORE

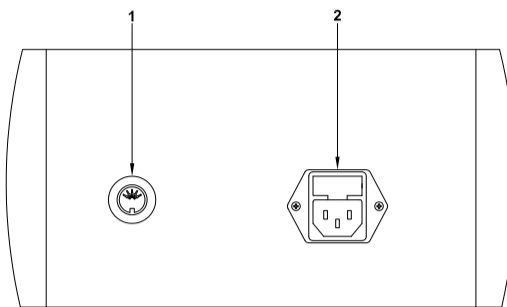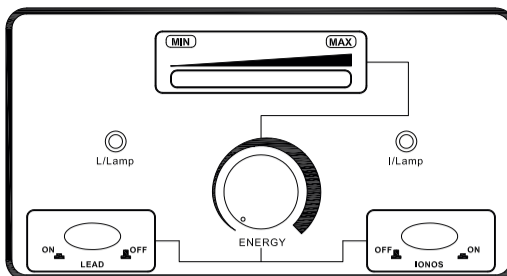


1. Manipolo galvanico

2. Cavo alimentazione elettrica

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

1. Connettere il cavo d'alimentazione nella parte posteriore.

2. Connettere gli accessori correttamente nel pannello frontale/posteriore.

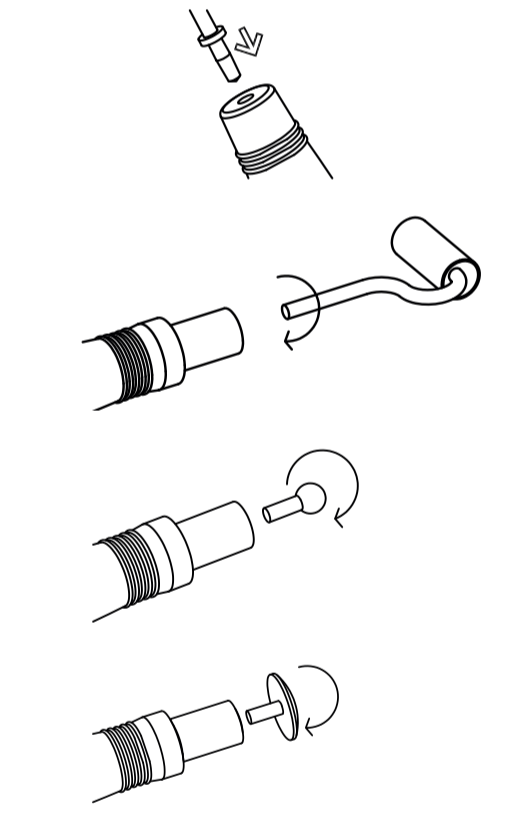

PRIMA DEL TRATTAMENTO:

1. L'area di trattamento deve essere lavata e asciugata prima di qualsiasi prodotto possa penetrare il tessuto cutaneo.

2. Il cliente tiene la barra metallica e l'estetista tiene il manipolo roll.

3. La polarità delle sonde può essere cambiata regolando il "LEAD" tra (R +) o (-G).

Polo positivo (anodo)	Polo negativo (catodo)
+R	-G
Rullo/palla (+), polo metallico(-)	Rullo/palla (-), polo metallico (+)
Soluzioni con ph acido	Soluzioni con ph alcalino

4. Coprire il rullo/sfera con un pezzo di cotone o spugna imbevuta d'una lozione adatta (secondo il trattamento). La lozione può anche essere applicata direttamente sulla pelle.

INIZIO DEL TRATTAMENTO:

1. Attivare "IONOS" e assicurare che il controller "I/ENERGY" è impostato al minimo.

2. Selezionare l'operazione premendo "LEAD".

3. Toccare la parte trattata con il rullo / sfera.

4. Lentamente regolare col tasto "I/ENERGY" la giusta intensità in cui il cliente si sente comodo. Far scorrere il rotolo senza problemi. Il cotone dovrebbe mantenere la sua umidità tutto il trattamento per un risultato ottimale.

PRECAUZIONI

• Assicurarsi sempre che i clienti rimuovono gioielli, e confermare che non hanno impianti metallici (viti nelle articolazioni, ecc.) dal suo ultimo trattamento.

• Le donne incinte e le persone con pelle sensibile, cute rotta, gonfia o con capillari espansi, non devono ricevere questo trattamento.

• I clienti con problemi di salute come le malattie cardiache o infettive, pelli ipoa-llergeniche o ipersensibili (vedere Controindicazioni) non possono utilizzare questo strumento.

• Assicurarsi che la superficie della pelle è ricoperta da abbondante prodotto conduttivo.

• Durante l'uso, il rullo non dovrebbe essere toccato dalla barra metallica. Se accade un incidente, lo strumento deve essere protetto e la corrente si spegne automaticamente. In tal caso, spegnere l'apparecchio col tasto "I/ENERGY" e avviarlo di nuovo. Per spegnere lo strumento, si prega di premere prima lo "I / ENERGIA" e poi il "IONOS".

SCHEMA TECNICA

Pesi e dimensioni	Dimensioni imballo (cm)	36x31x18,5
	Peso lordo (kg)	3,3
	Dimensione consola (cm)	31x17/24x13
Caratteristiche di lavoro	Potenza di lavoro (galvanico)	3 W
	Intensità di lavoro (galvanico)	380 - 1000 micro Am-peres
Caratteristiche elettriche	Voltaggio nominale	220V ~ 240V
	Frequenza	50Hz/60Hz
	Potenza nominal	3 W

FAQ

Comprovare il seguente se i rulli della sonda non girano più:

• Smontare e pulire a fondo.

• Se il rullo continua a non funzionare correttamente, contattare il vostro distributore.

MANTENIMENTO

Fare attenzione a non danneggiare i rulli della sonda. Non usare mai sostanze abrasive per pulire i rulli, perché i danni alla sua superficie potrebbero graffiare la superficie della pelle durante il trattamento; le aree danneggiate anche possono albergare batteri e rendere più difficile la sterilizzazione.

ACCESSORI

REF.	DESCRIZIONE
	MANIPOLO GALVANICO
	CAVO GALVANICO