

Manuale d'istruzioni

Microdermoabrasione con microcristalli

Avvertenze

- Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni all'apparecchiatura. Qualora dovesse essere necessaria un'ispezione, mettersi in contatto con il fornitore o con un tecnico specializzato.
- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, onde evitare di danneggiarne gli elementi elettrici.
- Non utilizzare mai l'apparecchiatura all'aperto: gli agenti meteorologici potrebbero danneggiarla.
- Qualora il cavo elettrico dovesse essere rotto o danneggiato, chiederne uno in sostituzione al distributore onde evitare eventuali rischi.

Riciclaggio



Il seguente simbolo, se presente su uno degli apparati elettrici o nell'imballaggio, indica che tali prodotti non possono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un adeguato trattamento dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento delle apparecchiature elettriche. Tale procedimento è necessario per aiutare a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

Dichiarazione di conformità CE

Il presente prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2014/35/EU
2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU

Benvenuti!


Grazie per aver effettuato l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il manuale d'istruzioni. È, inoltre, consigliato seguire le indicazioni di un professionista per assicurarsi di utilizzare l'apparecchio correttamente. L'Azienda declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti dovuti a un utilizzo non corretto dell'apparecchio.

Panello frontale



ISTRUZIONI D'USO

1. Connettere il cavo d'alimentazione nel pannello posteriore.
2. Accendere l'apparecchiatura tramite il tasto "POWER".
3. Montare il supporto porta-recipienti di plastica nel laterale dell'unità principale.
4. Collegare correttamente i tubi applicando una leggera pressione, come indicato nello schema sottostante.

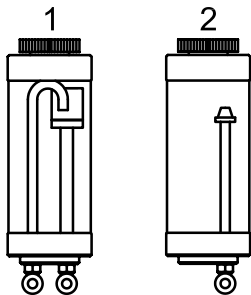


1. Contenitore di micro cristalli usati.
2. Contenitore di micro cristalli nuovi.

MICRODERMOABRASIONE CON MICRO CRISTALLI

Istruzioni d'uso


1. Fissare il supporto porta manipoli di plastica, lateralmente, sull'apparato.
2. Collegare i tubi correttamente come mostrato nello schema, facendo corrispondere le lettere di ciascun tubo con quelle dei contenitori. Per collegarli basta inserire il tubo ed esercitare una leggera pressione. Per rimuoverli, è necessario premere la parte in plastica della connessione e tirare il tubo senza forzarlo.

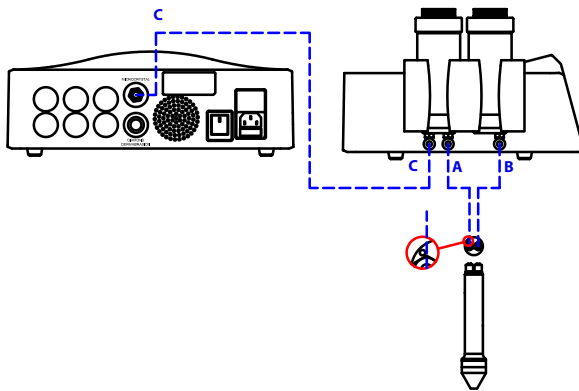

3. Riempire il contenitore n°2 con micro cristalli, facendo attenzione a non superare la linea indicata. La parte filettata del tappo deve essere completamente ripulita di micro cristalli; sono raccomandati i micro cristalli di granulometria 120.

Note importante:

- Verificare che la testina del manipolo non ostruisca il foro all'interno
- Non manipolare i micro cristalli con le mani.

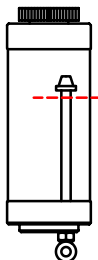

4. Regolare la potenza e la durata del trattamento tramite i tasti "ENERGY" e "TIMER", rispettivamente. La potenza d'uscita per difetto è 1 (regolabile 1-10) e la durata del trattamento predefinita è di 15 minuti (regolabile da 0-60 minuti).

5. Premere il tasto "START / PAUSE" per iniziare il trattamento. A questo punto il display dinamico indicherà che l'apparecchiatura è in funzione. L'operazione potrà essere interrotta e ripresa premendo lo stesso tasto.

6. Una volta terminato il tempo di durata del trattamento sarà emesso un segnale acustico, la funzione selezionata smetterà di funzionare e l'unità entrerà in modalità standby.

7. Finito il trattamento, il contenitore # 1 si sarà riempito di microcristalli usati ed il contenitore #2 sarà vuoto. Rimuovere e gettare i micro cristalli utilizzati e riempire il contenitore #2 per i trattamenti futuri. La parte del tappo filettata deve essere completamente pulita di microcristalli.

Nota importante: Non manipolare i micro cristalli con le mani.

Note

- Durante il trattamento tenere sempre il manipolo al di sotto dell'apparecchiatura: non lavorare mai reggendo il manipolo al di sopra dell'unità.
- Il contatto con la pelle dovrebbe durare tra 3 e 5 secondi. Una volta trascorso questo tempo, sollevare il manipolo ed applicarlo in un altro punto della zona da trattare.

Precauzioni

- Disinfettare ed asciugare la pelle. Non è necessario applicare alcuna lozione prima del trattamento.
- Coprire gli occhi durante il trattamento per evitare che posano entrarci micro cristalli.
- Durante il trattamento intorno alla zona degli occhi, regolare il livello di potenza tra 1 e 5. Basterà applicare il soffione in questa zona soltanto due volte.
- Evitare l'esposizione al sole nelle 24 ore successive al trattamento.
- Non usare trucco nelle quattro ore successive trattamento.
- Non sottoporsi a sessioni di sauna nei 10 giorni successivi al trattamento.
- Dopo aver completato il trattamento, utilizzare prodotti neutri per reidratare la pelle: evitare assolutamente prodotti acidi.

MANTENIMENTO

- Il filtro nel contenitore n°. 1 impedisce che i micro cristalli penetrino nel circuito di aspirazione dell'apparecchio. Vengono consegnati quattro filtri di ricambio. Per sostituire il filtro sarà necessario svitare il tappo del contenitore, rimuovere il vecchio filtro, inserire il nuovo filtro e riavvitare il tappo.
- Pulire e disinfettare la parte superiore del manipolo dopo ogni trattamento. È raccomandato immergerli prima in uno sterilizzatore ad ultrasuoni e poi in uno sterilizzatore UV.