

Istruzioni di utilizzo

Microdermoabrasione con punte di diamante

Avvertenze

- Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni all'apparecchiatura. Qualora dovesse essere necessaria un'ispezione, mettersi in contatto con il fornitore o con un tecnico specializzato.
- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, onde evitare di danneggiarne gli elementi elettrici.
- Non utilizzare mai l'apparecchiatura all'aperto: gli agenti meteorologici potrebbero danneggiarla.
- Qualora il cavo elettrico dovesse essere rotto o danneggiato, chiederne uno in sostituzione al distributore onde evitare eventuali rischi.
- Non provare a separare il generatore di acciaio inossidabile della sua fodera di gomma (manico); qualsiasi tentativo potrebbe causare danni irreparabili al generatore.

Dichiarazione di conformità CE

Il presente prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2014/35/EC
2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EC

Riciclaggio

Il seguente simbolo, se presente su uno degli apparati elettrici o nell'imballaggio, indica che tali prodotti non possono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un adeguato trattamento dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento delle apparecchiature elettriche. Tale procedimento è necessario per aiutare a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

Benvenuti!

Grazie per aver effettuato l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il manuale d'istruzioni. È, inoltre, consigliato seguire le indicazioni di un professionista per assicurarsi di utilizzare l'apparecchio correttamente. L'Azienda declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti dovuti a un utilizzo non corretto dell'apparecchio.

L'Azienda si riserva, inoltre, il diritto di modificare o correggere informazioni sulle apparecchiature senza previo avviso. Qualora si dovessero riscontrare errori nelle presenti istruzioni, vi preghiamo di inviarci un'e-mail al fine di correggerli.

Pannello frontale



Istruzioni d'uso

1. Connettere il cavo d'alimentazione nella parte posteriore dell'unità principale.
2. Accendere l'apparecchiatura tramite il tasto "POWER".
3. Connettere un lato del tubo nella parte posteriore dell'unità principale e l'altro lato al manipolo.
4. Inserire la punta di diamante specificata nel manipolo. Ci sono 9 tipi diversi di punte in dotazione, come illustrato nella scheda a continuazione.
5. Verificare che il filtro di metallo (Filtro 1), il filtro di gommapiuma (Filtro 2) e le guarnizioni siano correttamente inseriti nel manipolo (svitandolo e riavvitandolo). Quindi, inserire la parte posteriore del manipolo all'interno del tubo.


Ø 22 MM	
D100	Corporale. Indicato per acne, ginocchia, gomiti e aree con smagliature.
D180	

Ø 19 MM	
D180	Viso. Indicato per macchie grandi, pori, invecchiamento per esposizione solare.
D220	

Ø 15 MM	
D100	Cicatrici, linee fini e diversi inestetismi.
D200	
D250	

Ø 8 Y 6 MM	
D200	Zona orbicolare ed entrambi i lati del naso. Rughe, acne, brufoli e punti neri.
D250	

6. Impostare l'effetto di suzione desiderato tramite i tasti "ENERGY".
7. Premere il tasto "START/PAUSE" per iniziare il trattamento.

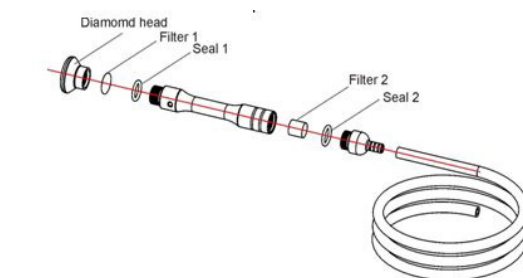

8. Per regolare l'effetto di suzione sulla pelle del paziente nel corso del trattamento, tappare e stappare il foro situato su un lato del manipolo con il dito indice.

Precauzioni

- Non lasciare il manipolo sulla stessa zona della pelle troppo a lungo, al fine di evitare possibili lesioni.
- Evitarne l'uso su pelli irritate.
- Le seguenti zone di pelle non sono adeguate per questo tipo di trattamenti: tumori della pelle, nei, marche, angiomi, labbra, occhi, herpes e verruche.
- Non lasciare la pompa di suzione in funzione per periodi di tempo troppo prolungati senza aspettare il necessario tempo di raffreddamento tra un trattamento e l'altro, al fine di evitare il surriscaldamento della pompa e conseguenti danni all'apparecchiatura. I danni causati per surriscaldamento della pompa non sono coperti dalla garanzia del produttore.

FAQ

Se il dispositivo produce un suono anomalo:

- Rimuovere le 4 viti di seguito illustrate. Tali viti servono a fissare la pompa durante il trasporto dell'apparecchiatura. È possibile che siano esse ad interrompere la corretta vibrazione della pompa durante il funzionamento, portando l'apparecchio ad emettere un suono anomalo.
- Se l'effetto di suzione si riduce sostituire i filtri di metallo e di gommapiuma.



MANUTENZIONE

- I filtri di gommapiuma e i filtri di metallo del manichino devono essere sostituiti ogni 5 trattamenti. Smontare il manichino e sostituire i filtri. Quindi rimontare il manichino.
- Pulire e disinfettare le punte di diamante dopo ogni trattamento.