

IT

Manuale d'istruzioni

MICRODERMOABRASIONE

AVVERTENZE

- Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni della macchina. Se fosse necessaria un'ispezione, mettersi in contatto con il fornitore o un tecnico specializzato.

- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, quali zone di acqua, bagni, ecc. in modo da prevenire danni degli elementi elettrici dell'apparecchiatura.

- Non utilizzare mai l'apparecchio all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero causare danni.

- Se il cavo elettrico fosse rotto, chiedere al distributore di fornirne un altro per evitare rischi.

- Non lasciare le sonde ultrasuoni accese senza controllo perché potrebbero surriscaldarsi e causare danni alla sonda o diminuire la loro vita utile.

- Non provare a separare il generatore di acciaio inossidabile dal suo manico di gomma; qualsiasi tentativo di farlo potrebbe causare danni irreparabili al generatore.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Questo prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2014/35/EU

2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU

RICICLAGGIO

 Quando questo simbolo è indicato in uno qualsiasi dei nostri prodotti elettrici o nell'imballaggio, vuol dire che tali prodotti non devono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un trattamento adeguato dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento degli apparecchi elettrici. Questo procedimento aiuta a conservare l'ambiente e a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

BENVENUTI!

Grazie per aver fatto l'acquisto. Prima d'utilizzare l'apparecchiatura, leggere attentamente le istruzioni. Inoltre, è consigliato ricevere indicazioni da un professionista per essere sicuri di utilizzare correttamente l'apparecchiatura.

L'azienda declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti dovuti a una manipolazione non corretta del prodotto.




L'azienda si riserva il diritto di correggere le informazioni sugli apparecchi senza previo avviso. Se riscontrate errori in queste istruzioni, vi preghiamo di scriverci un'e-mail affinché possiamo correggerle.

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO


- Questi elementi sono soggetti a modifiche senza previo avviso.

- L'aspetto del prodotto può differire dall'immagine.

N°	PRODOTTO	REF.	QUANT.
1	TUBO		1
2	MANIPOLO	-	2
3	SACCHETTO DI FILTRI E RICAMBI	-	1
4	PUNTE DI DIAMANTE Ø6		1
5	PUNTE DI DIAMANTE Ø8		1
6	PUNTE DI DIAMANTE Ø15		3
7	PUNTE DI DIAMANTE Ø19		2
8	PUNTE DI DIAMANTE Ø22		2
9	UNITÀ PRINCIPALE	-	1
10	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA	- -	1

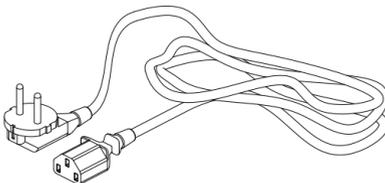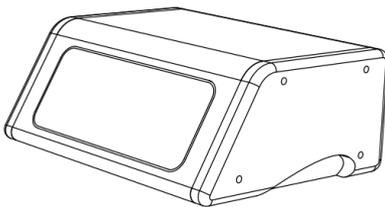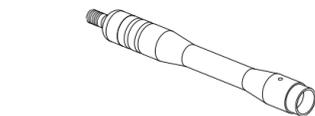

PANNELLO FRONTALE/ POSTERIORE

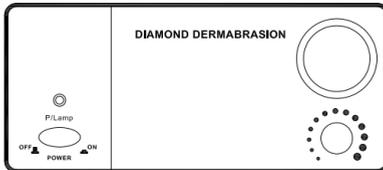

1. Tubo

2. Cavo alimentazione elettrica

ISTRUZIONI D'USO

1. Collegare correttamente un lato del tubo nel pannello posteriore, come indicato sull'immagine.

ISTRUZIONI D'USO

1. Collegare correttamente un lato del tubo nel pannello posteriore, come indicato sull'immagine.

2. Connettere l'altro lato del tubo al manico di suzione. Inserire il capezzale di diamante indicato nel manico. Ci sono nove tipi di capezzali.



Ø 22 MM

D100 Corporale. Indicato per acne, ginocchia, gomiti e aree con smagliature.

Ø 19 MM

D180 Viso. Indicato per macchie grandi, pori, invecchiamento per esposizione solare.

Ø 15 MM

D100 Cicatrici, linee fini e diversi inestetismi.

D200


D250

Ø 8 Y 6 MM

D200 Occhi ed entrambi i lati del naso. Rughe, acne, brufoli e punti neri.

D250

3. Verificare che il filtro di schiuma sia posizionato correttamente nel manico.

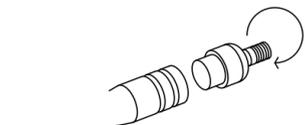

4. Verificare che il filtro di metallo sia posizionato correttamente nel manico.



5. È possibile regolare l'effetto di suzione tramite girando il regolatore.

6. È possibile regolare l'effetto di suzione tappando o stappando il foro al lato del manico con il dito.

7. Una volta terminato il trattamento, spegnere l'apparecchiatura mediante il tasto "POWER".

PRECAUZIONI

- Non lasciare il manico nella stessa parte della pelle durante molto tempo,

- Evitare l'uso su pelli irritate.

- Le seguenti aree della pelle non sono adeguate per questi trattamenti: tumori della pelle, nei, marche, angioma, labbra, occhi, herpes e verruche.

- Non far funzionare la pompa di suzione per lunghi periodi senza tempo di raffreddamento tra i trattamenti, per evitare il surriscaldamento della pompa e danni all'apparecchiatura. I danni causati per surriscaldamento della pompa non sono coperti dalla garanzia del fabbricante.

FAQ

Se il dispositivo non suziona nonostante l'azione del regolatore di pressione:

- Svitare il regolatore di pressione completamente.

- Verificare che la valvola di gomma nera nell'esterno del regolatore non sia rotta.

SCHEDA TECNICA

Pesi e dimensioni	Dimensioni imballaggio (cm)	36x31x1,85
	Peso lordo (Kg)	3,8
	Dimensioni unità principale (cm)	31x17/24x13
Caratteristiche di lavoro	Potenza di lavoro	65 W
	Pressione di lavoro	0 ~ -0,8 bar
Caratteristiche elettriche	Voltaggio nominale	220V ~ 240V
	Frequenza	50Hz/60Hz
	Potenza nominale	65 W

- Se così fosse, ritirare i pezzi della valvola dell'unità ed il regolatore.

- Prendere una delle valvole di gomma nera in dotazione e inserirla nel regolatore con un po' di pressione.

Se l'effetto di suzione si riduce:

- Cambiare i filtri di metallo e i filtri di schiuma.

MANTENIMENTO

- I filtri di schiuma e i filtri di metallo nel manico si devono cambiare ogni 5 trattamenti. Smontare il manico e sostituire i filtri. Quindi rimontare il manico.

- Pulire e disinfettare i capezzali di diamante dopo ogni trattamento.

ACCESSORI

REF.	DESCRIZIONE
	TUBO
	BOSACCHETTO DI FILTRI E RICAMBI
	PUNTE DI DIAMANTE Ø6
	PUNTE DI DIAMANTE Ø8
	PUNTE DI DIAMANTE Ø15
	PUNTE DI DIAMANTE Ø19
	PUNTE DI DIAMANTE Ø22