

Manuale d'istruzioni

# ULTRASUONI (VISO E CORPO)

---

## Avvertenza

- Non aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni dell'apparecchiatura. Qualora fosse necessaria un'ispezione, contattare il fornitore o un tecnico specializzato.
- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, come qualsiasi zona con acqua, bagni, ecc. onde evitare possibili danni agli elementi elettrici.
- Non utilizzare mai l'apparecchiatura all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero causare danni all'unità.
- Qualora il cavo elettrico fosse rotto, chiedere a un professionista di fornirne uno nuovo e modificarlo, onde evitare rischi, oppure contattare il fornitore.

---

## Reciclaggio



Il seguente simbolo, se presente su uno degli apparati elettrici o nell'imballaggio, indica che tali prodotti non possono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un adeguato trattamento dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento delle apparecchiature elettriche. Tale procedimento è necessario per aiutare a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

---

## Dichiarazione Di Conformità CE

Il presente prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2014/35/EU
2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU


---

## Bienvenuti!

Il seguente simbolo, se presente su uno degli apparati elettrici o nell'imballaggio, indica che tali prodotti non possono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un adeguato trattamento dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento delle apparecchiature elettriche. Tale procedimento è necessario per aiutare a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

---

## PANNELLO FRONTALE

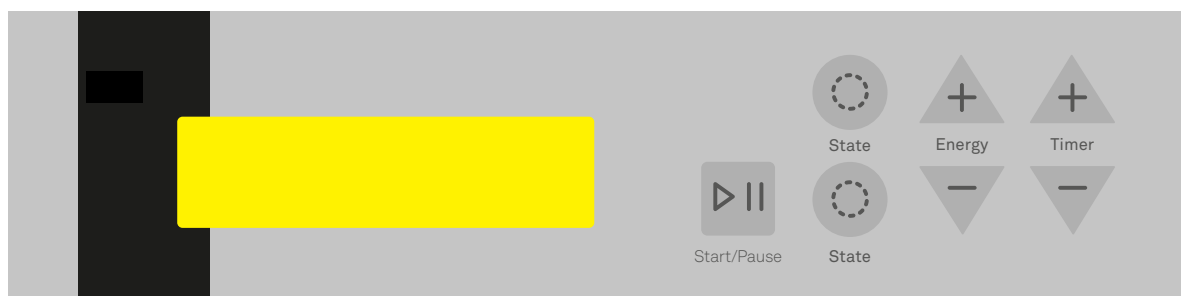

---

### Istruzioni d'uso

1. Connettere il cavo d'alimentazione nella parte posteriore del pannello.
2. Connettere gli accessori nella parte posteriore del pannello.
3. Premere il tasto "POWER".

#### Prima di iniziare il trattamento:

1. Pulire / tonificare l'area da trattare con prodotti adeguati ad ogni tipo di pelle.
2. Rimuovere qualsiasi prodotto in eccesso con l'aiuto di un vaporizzatore facciale per la durata di 10 minuti.
3. Pulire nuovamente l'area da trattare per eliminare qualsiasi tipo di sporcizia o residuo dal viso, evitandone, così, il riassorbimento nella pelle dovuto alle onde ultrasuoni.
4. Tonificare tutto il viso (o l'area da trattare) con delicatezza utilizzando un astringente adeguato.
5. Dopo aver risciacquato l'astringente, è necessario pulire la pelle a fondo per una protezione ottimale.
6. Applicare una quantità sufficiente di gel conduttore sull'intera area da trattare.

#### Inizio del trattamento:

1. Selezionare la sonda ultrasuoni mediante il tasto "SELECT", il tipo di onda attraverso il tasto "STATE", la potenza desiderata premendo il tasto "ENERGY" e la durata del trattamento mediante il tasto "TIMER". È possibile cambiare questi parametri in qualsiasi momento.
2. Premere il tasto "START/PAUSE" per iniziare.
3. Effettuare un massaggio con la sonda mediante piccoli movimenti circolari fino a coprire tutta l'area destinata al trattamento. La durata del trattamento cambierà in funzione delle dimensioni dell'area da trattare. Un trattamento standard completo per il volto dovrebbe avere la durata di 10-15 minuti di massaggio ripetitivo.

---

### Note

- Assicurarsi sempre di applicare sufficiente gel conduttore per almeno 15 minuti di trattamento.
- Generalmente, le potenze più basse si usano per i trattamenti facciali, e quelle più alte per i trattamenti corporali.
- Se l'area da trattare è piccola o sensibile, utilizzare la sonda orbicolare ed assicurarsi che l'intensità si limiti a 5-7 (in "ENERGY" sullo schermo LCD). Anche la durata del trattamento è raccomandabile ridurla a 10-18 minuti.
- Un pacchetto di trattamento standard ha la durata totale di circa 10 sessioni, con un periodo minimo di riposo di un giorno tra una sessione e l'altra. Qualora si dovessero effettuare altri trattamenti facciali sulla stessa zona, sarà necessario un periodo minimo di riposo di 7 giorni tra una sessione e l'altra.

---

### Precauzioni

- Non usare mai sulla pelle asciutta.
- Non usare sulla zona ventrale delle donne in stato di gravidanza.
- Non usare su persone con pacemaker (o qualsiasi apparecchiatura elettrica di ausilio al cuore).
- Non usare su persone che soffrono di una malattia cardiaca.
- Utilizzare sempre le sonde dopo essersi assicurati che sulla pelle ci sia sufficiente crema idratante o siero.
- Il trattamento ad ultrasuoni è adeguato per ogni tipo di pelle. La durata del massaggio e l'impostazione dell'apparecchiatura possono essere regolati a seconda del tipo di pelle. Per le pelli molto sensibili è necessario ridurre la durata del trattamento a 3-5 minuti ed assicurarsi che la potenza sia al livello minimo per poter iniziare.

---

## **FAQ**

Se l'apparecchiatura si accende ma la sonda non funziona:

- Collocare una goccia d'acqua sulla sonda.
- Accendere l'apparecchiatura ed aumentare gradualmente la potenza.
- Se l'acqua comincia a muoversi ed evapora, ciò sta a significare che sia l'apparecchiatura che la sonda stanno funzionando correttamente. In caso contrario vorrà dire che la sonda non sta funzionando correttamente.

Se sia l'apparecchiatura che la sonda stanno funzionando correttamente, ma il paziente non sente nessun effetto:

- Assicurarsi di aver applicato sufficiente gel conduttore sull'area da trattare.

---

## **Manutenzione**

- La sonda ultrasuoni deve essere pulita con acqua distillata (non calda) ed un panno pulito e soffice, per poi essere sterilizzata chimicamente tramite un appropriato liquido sterilizzatore. Asciugare con attenzione la sonda dopo la sterilizzazione e conservarla al sicuro nella sua scatola dopo ogni utilizzo.
- Non sommergere mai la sonda in nessun liquido!